

# Français



**Sonic Alert**

Specialized Hearing Solutions

**Réveil USB Bombe Sonique avec Vibreur pour Lit et variateur 5-niveaux**

Modèle SBT600ss



## MODE D'EMPLOI

### IMPORTANT:

- Veuillez lire attentivement cette notice et la conserver pour toute consultation ultérieure. Voir les instructions de fonctionnement au verso du document.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni ou recommandé Sonic Alert pour brancher l'unité.

**Avertissement :** pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.




Avant de raccorder l'appareil au réseau électrique, assurez-vous que les exigences spécifiées sur l'appareil correspondent à l'alimentation électrique disponible dans le pays, soit CA100-240V~, 50/60 Hz.

- La ventilation ne doit pas être entravée, les orifices d'aération doivent rester libres de tout objet, tel que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.;
- Aucune source de flamme nue, comme une bougie allumée ne doit être placée sur l'appareil.
- L'appareil ne sera pas installé à proximité d'un dispositif qui goutte ou soumis à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur l'appareil, tel qu'un vase par exemple.
- Ne placez pas l'appareil dans un meuble fermé ou sur un rack ne disposant pas d'une ventilation adéquate.
- Lorsque la fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, celle-ci doit toujours être facilement accessible.

### Mode de Test :

- 1) Appuyez sur les boutons Snooze (rappel d'alarme) et Time (réglage de l'heure) et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de test. L'écran affiche «TEST7» pour indiquer qu'il se trouve en mode TEST.
- 2) Si dans la minute qui suit, aucun bouton n'est pressé, il sortira du mode de test et reviendra en mode de réglage de l'heure.
- 3) Une pression sur un bouton dans la minute qui suit (sauf sur les boutons Snooze (rappel d'alarme) et Time (réglage de l'heure), qui n'ont aucun effet), fera quitter immédiatement l'appareil du mode de test.
- 4) En mode de test, les fonctions du réveil sont affichées, à savoir l'avertisseur sonore, le flash et le vibreur (si ce dernier est branché).
- 5) Une fois les opérations du mode test terminées, appuyez sur un bouton quelconque (sauf sur les boutons Snooze (rappel d'alarme) & Time (réglage de l'heure), qui n'ont aucun effet) pour quitter immédiatement ce mode.

## Réveil Bombe Sonique & Vibreur de Lit avec 5-niveaux variateur et USB Rechargement Modèle SBT600ss

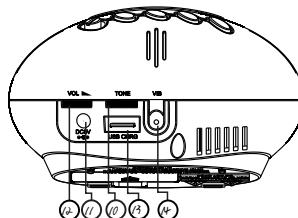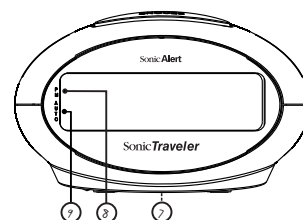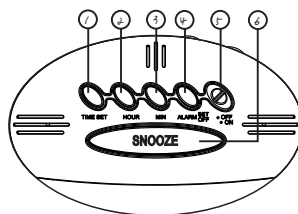

### Les caractéristiques

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Réglage de l'heure          | 7. Couvercle de la batterie                  |
| 2. Heure                       | 8. Indicateur PM                             |
| 3. Min.                        | 9. Automatique (Indicateur d'alarme activée) |
| 4. Alarme Réglage / désactivée | 10. Tonalité                                 |
| 5. Alarme activée / désactivée | 11. Entrée CC5V                              |
| 6. Rappel d'alarme / Variateur | 12. Volume                                   |
|                                | 13. Chargement USB                           |
|                                | 14. Entrée du vibreur                        |

### Réglage de l'heure –

- 1) Appuyez simultanément sur les boutons **Time Set (1)** (réglage de l'heure) et **Hour (2)** (heure) et maintenez-les enfoncés pour faire défiler les heures rapidement jusqu'au réglage correct.
- 2) Appuyez simultanément sur les boutons **Time Set (1)** (réglage de l'heure) et **Minute (3)** (minutes) et maintenez-les enfoncés pour faire défiler les minutes jusqu'au réglage correct.

**Un point lumineux (8)** placé dans le coin supérieur gauche de l'horloge indique les heures de l'après-midi au format américain (12h). Pour les heures matinales (AM), le point lumineux n'est pas allumé.

### Réglage de l'heure de déclenchement de l'alarme –

- 1) Appuyez simultanément sur les boutons **Alarm Set (4)** (réglage de l'alarme) et **Hour (2)** (heure) et maintenez-les enfoncés pour faire défiler les heures rapidement jusqu'au réglage correct.
- 2) Appuyez simultanément sur les boutons **Alarm Set (4)** (réglage de l'alarme) et **Minute (3)** (minutes) et maintenez-les enfoncés pour faire défiler rapidement l'affichage d'alarme jusqu'au réglage correct.
- 3) Assurez-vous que l'heure de déclenchement de l'alarme est correctement réglée pour le matin (AM) ou l'après-midi (PM), le **point lumineux (8)** indiquant les heures de l'après-midi. Veuillez à relâcher les boutons HOUR et MIN avant de relâcher le bouton ALARM.

### Sélection du format 12 heures ou 24 heures –

- 1) Appuyez sur le **bouton Hour (heure) (2)** et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour entrer dans le mode de sélection de l'heure; relâchez le **bouton Hour (2)** lorsque l'écran affiche «12H» ou «24H».
- 2) Appuyez sur le bouton de l'heure et relâchez-le pour basculer entre les formats 12 heures et 24 heures. Si aucune sélection n'est faite dans les 4 secondes, le dernier format d'heure s'affichera et l'appareil reviendra en mode horaire normal.

### Alarme du réveil –

- 1) Si seul l'avertisseur est requis, ne branchez pas le vibreur.
- 2) Réglez le volume de l'avertisseur sonore souhaité à l'aide du **bouton de volume (12)**.
- 3) Si seul le vibreur est requis, ne le branchez pas dans la prise **du vibreur (14)** et désactivez le son à l'aide du **bouton de volume (12)**.
- 4) Si les deux fonctions, avertisseur sonore et vibreur, sont requises, branchez le vibreur et réglez le volume sur le niveau souhaité.
- 5) Réglez l'alarme de réveil selon les instructions citées ci-dessus.

## Régler la durée de l'alarme -

Le paramètre par défaut pour la durée de l'alarme est réglé sur 30 minutes ; vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 59 minutes. Pour régler la durée de l'alarme :

- 1) Appuyez sur le **bouton AL.SET (réglage de l'alarme) (4)** puis maintenez-le enfoncé pendant six secondes. L'écran du réveil montrera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '30', relâchez le **bouton AL.SET**.
- 2) Appuyez sur le bouton **MIN (3)** pour régler la durée de l'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 59 minutes).
- 3) Lorsque la durée d'alarme souhaitée s'affiche à l'écran, l'appareil retourne en mode normal, après trois secondes. Le nouveau paramètre de durée d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

## Arrêter l'alarme -

L'alarme peut être arrêtée temporairement pour la journée ou de manière permanente.

- 1) Afin que l'alarme s'arrête, appuyez simplement sur le **bouton AL off (4) (arrêt de l'alarme)**. L'alarme s'arrêtera automatiquement pour la journée et sera réactivée le lendemain à la même heure si le réglage de l'alarme n'a pas été modifié.
- 2) Pour arrêter l'alarme de façon permanente, faites glisser le **commutateur de fonction ON/OFF (5)** sur la position off (arrêt). L'alarme ne sera pas réactivée avant d'avoir remis le **commutateur de fonction ON/OFF (5)** sur la position ON.

## Fonctionnement du rappel d'alarme-

Appuyez sur le bouton **SNOOZE (6)** (rappel d'alarme) après que l'alarme ait retenti. L'alarme sera désactivée et vous bénéficierez de 9 minutes de sommeil supplémentaire. L'alarme retentira à nouveau après 9 minutes. Vous pouvez répéter plusieurs fois cette opération, jusqu'à 119 minutes.

## Réglage de la durée du rappel d'alarme

Le paramètre par défaut pour la durée du rappel d'alarme est réglé sur 9 minutes, mais vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 30 minutes. Pour régler la durée du rappel d'alarme :

- 1) Appuyez sur le **bouton SNOOZE (rappel d'alarme) (6)** et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes. L'écran du réveil affichera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '9'. Relâchez le bouton de rappel d'alarme.
- 2) Appuyez sur le bouton **MIN (3)** pour régler la durée du rappel d'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 30 minutes).
- 3) Lorsque la durée du rappel d'alarme souhaitée est affichée à l'écran, l'appareil, retourne en mode normal après 3 secondes. Le nouveau paramètre de la durée du rappel d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

## Volume -

Pour régler le volume, faites tourner la molette **de volume (12)** jusqu'au niveau désiré.

## Tonalité -

Réglez la tonalité en tournant la **molette de tonalité (10)** jusqu'au niveau désiré.

## Fonctionnement du variateur

Il existe une fonction de réglage à 5 niveaux de l'écran DEL. Appuyez une fois sur le **bouton SNOOZE (6)** pour modifier la luminosité de l'écran. Le cycle de luminosité de clair à sombre, puis de sombre à clair.

**\*REMARQUE\*** : le variateur ne fonctionne pas si le réveil se trouve en mode de rappel d'alarme.

## Vibreux pour lit / vibreur -

- 1) Fixez le connecteur du vibreur pour lit au dos du réveil, sur **l'entrée du VIBREUR (14)**.
- 2) Placez le vibreur sous le matelas ou l'oreiller.

## Chargement USB

Ce réveil est équipé d'un port USB pratique, placé sur le panneau arrière, qui permet de recharger les téléphones portables, lecteurs de disques mobiles et autres appareils portables de plusieurs marques différentes, fournis avec un câble USB. La puissance de sortie du port USB est de 500mA.

Pour charger votre appareil, branchez le câble USB, fourni avec votre dispositif portable dans le **port USB (13)** placé sur le panneau arrière de ce réveil. Vérifiez l'indicateur sur votre appareil pour confirmer qu'il est bien en train de se charger.

**Remarque** : la durée de charge variera en fonction du courant de charge requis par votre appareil. Par conséquent, certains appareils prendront plus de temps à se charger que d'autres.

## Batterie de secours -

Pour utiliser la batterie de secours, installez une pile alcaline de 9V à la base du réveil, dans le **compartiment des piles (7)**. Veuillez noter qu'en cas de coupure d'électricité, l'écran LED n'affichera plus l'heure, mais l'horloge continuera de fonctionner et affichera l'heure correcte dès que l'appareil sera à nouveau alimenté en électricité.

**REMARQUE** : pour des résultats optimaux, il est recommandé de changer la batterie tous les 6-8 mois. Si le réveil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de retirer la pile afin d'éviter les fuites d'acide.



## Alimentation d'entrée CC 5V -

Fixez l'adaptateur de courant CC au dos de l'horloge sur l'entrée référencée **CC5V --- IN (11)**


## INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adaptateur secteur homologué UL CA100-240V~, 50/60Hz

Consommation électrique : Sortie de l'adaptateur : CC5V ---, 800mA

 <p>Le triangle montrant un éclair en forme de flèche est un symbole d'avertissement indiquant la présence d'une tension élevée à l'intérieur du produit.</p>	<p><b>ATTENTION :</b> POUR RÉDUIRE LE RISQUE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA FACE ARRIÈRE) DU PRODUIT. AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR SONIC ALERT.</p>	 <p>Le triangle contenant un point d'exclamation est un symbole d'avertissement afin d'attirer votre attention sur les instructions importantes fournies avec le produit.</p>
--	---	--

## AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

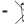- Nous attirons votre attention sur les aspects environnementaux à prendre en compte, lorsque vous vous débarrassez des piles ;
-  les points de collecte sont différents s'il s'agit d'appareils électriques ou électroniques.

La fonction normale peut être affectée par de fortes interférences électromagnétiques (à partir d'autres appareils). Si cela se produit, essayez de déplacer l'appareil vers un autre emplacement. La fonction normale devrait reprendre, mais vous devrez peut-être réinitialiser réinitialiser l'unité en suivant la procédure décrite dans le manuel d'instructions.

## RECOMMANDATIONS POUR LE RECYCLAGE

La directive DEEE (Déchet d'Équipement Électrique et Électronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation, réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie. Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas dans votre poubelle ménagère.

Suivez l'une des procédures décrites ci-dessous :

- Déposez les piles et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Ou rapportez votre ancien appareil chez le distributeur qui vous vendra le nouveau. Il devra l'accepter. Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

**DECLARATION CE** : CE produit respecte les exigences demandées par la directive européenne tel que la directive Compatibilité électromagnétique (EMC) 2004/108/EC et la directive basse tension (LVD) 2006/95/EC. (Si applicable).

La déclaration de conformité peut être consultée sur le site: [www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

## GARANTIE LIMITÉE DEUX ANS SUR LE PRODUIT SONIC ALERT


Le réveil Sonic Alert est garanti pendant deux (2) ans, à compter de sa date d'achat. La garantie ne couvre pas les accidents, les pièces cassées, les liquides renversés, ni la négligence de l'utilisateur. La garantie Sonic Alert ne limite en aucun cas les droits que vous accorde la loi. Le produit est couvert par la garantie légale de conformité telle que prévue par la réglementation applicable.

**Important: votre facture d'achat est un élément essentiel de votre garantie. elle vous sera demandée en cas d'intervention sous garantie.**

Geemarc Telecom: SAV au (0) 3 28 58 75 99

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée, 59791 Grande Synthe Cedex, FRANCE

Distribué par:  **FRANCE**

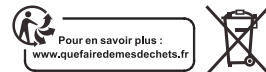

Parc de l'étoile, 2 rue Galilée,  
59791 Grande-Synthe Cedex  
Tel: +33 (0) 3 28 58 75 75 Fax: +33 (0) 3 28 58 75 76  
[www.geemarc.com](http://www.geemarc.com)

