


Der **AVISO Bee Baby** ist ein Sender zum AVISO Bee System, der auf die Tonfrequenz von Säuglingen und Kleinkindern reagiert und Blitzsignale auslöst. Das Gerät hat einen aufladbaren Akku.

**Voraussetzung:** Vorgängig muss ein AVISO Bee System mit mindestens einem AVISO Bee Flash (Empfänger mit Funkrepeater) installiert worden sein.

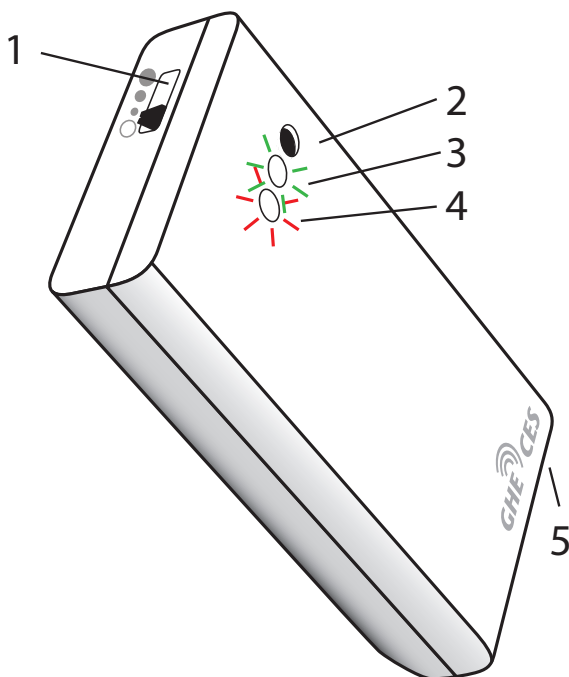

Netzgerät

## 1 Aufladen

Laden Sie den AVISO Bee Baby vor der ersten Inbetriebnahme mit dem mitgelieferten Netzgerät während mindestens drei Stunden auf:

- Netzgerät an Steckdose anschliessen und den kleinen Stecker an der Unterseite in Buchse (5) einstecken. Die rote LED (4) leuchtet dauernd.
- Wenn die rote LED erlischt, ist der Akku voll aufgeladen. Ein voller Akku hält ca. 5 Tage, abhängig von der Häufigkeit der angezeigten Schreie.

## 2 In Betrieb nehmen

(Ein/Aus-) Schiebeschalter (1) nach rechts auf die mittlere Markierung ● stellen. Nach zwei bis drei Sekunden leuchtet die grüne LED (3) auf, das Gerät ist mit einem AVISO Bee Flash verbunden.

Sollte die rote LED (4) aufleuchten, konnte keine Verbindung zu einem Flash gefunden werden. Stellen Sie den Schiebeschalter zurück auf Position 0 und installieren Sie mindestens einen AVISO Bee Flash.

Der AVISO Bee Baby sollte in der Nähe, aber nicht in Griffweite des Kindes aufgestellt werden. Er kann auch mithilfe des Clips befestigt werden.

In Betrieb, leuchtet die grüne LED (3) alle 5 Sekunden ganz kurz auf. Wird ein Ton detektiert, leuchtet sie für eine Sekunde.

## 3 Regelung der Empfindlichkeit

Die Empfindlichkeit des Mikrofons (2) des AVISO Bee Baby wird mit dem Schalter (1) geregelt: Testen Sie zuerst auf der Position ● (mittlere Empfindlichkeit) ob das Gerät gut auf die Schreie des Baby reagiert. Die Empfindlichkeit kann mit dem Schalter (1) reduziert ● oder erhöht ● werden.

## 4 Ausschalten

Taste (1) auf Position 0 schieben.

Es empfiehlt sich, das Gerät nun wieder mit dem Netzgerät aufzuladen, damit es jederzeit einsatzbereit ist.

## 5 Akku bald leer


Wenn der Akku bald leer ist, blinkt nach jedem Schreien auf allen AVISO Bee Flash während 5 Minuten die rote LED. Ebenso blinkt die rote LED am AVISO Bee Baby (4) alle 5 Sekunden kurz auf.

# Mode d'emploi

## AVISO Bee Baby (Hardware H2 / Software Revision V3.xx)

L'AVISO Bee Baby détecte les pleures de bébé. Il est alimenté par un accumulateur interne.

**Condition d'usage:** Il faut au moins un AVISO Bee Flash (récepteur / ré-émetteur) déjà installé.

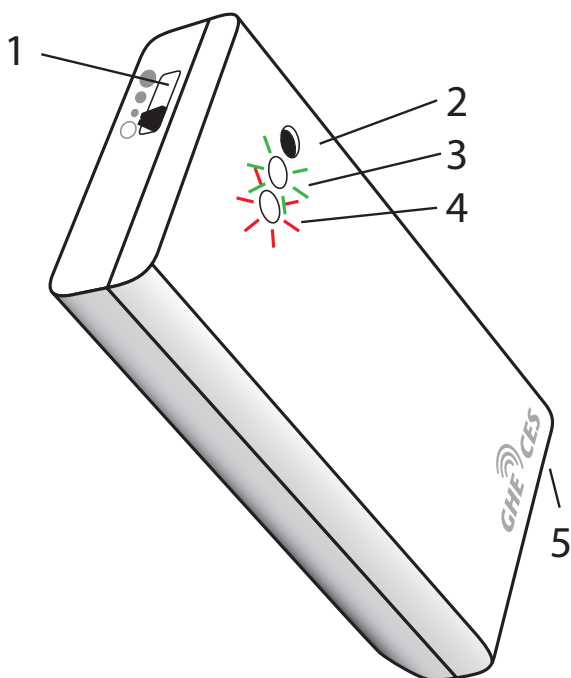

Chargeur

### 1 Charge

Connectez le chargeur au réseau 230 V et enfichez la petite fiche dans la prise (5) en bas de l'AVISO Bee Baby avant la première utilisation pendant 3 heures. La LED rouge (4) brille en continuité.

L'AVISO Bee Baby est chargé complètement quand la LED rouge s'éteint.

### 2 Mise en Service

Glissez l'interrupteur principal (1) en position médiane ●. Après deux à trois secondes, la LED vert (3) clignote une fois, l'émetteur est connectée à un AVISO Bee Flash.

Si la LED rouge (4) clignote une fois, la connection avec un Flash n'est pas possible. Veuillez remettre l'interrupteur à la position 0 et installez au moins un AVISO Bee Flash.

Posez l'AVISO Bee Baby à proximité de l'enfant, mais au dehors à la portée de l'enfant, il peut être fixé avec le clip.

En propre fonction, la LED vert (3) clignote très courte toutes les 5 secondes. Si un son est détecté, la LED verte s'allume pour une seconde.

### 3 Réglage de la sensibilité

La sensibilité du microphone (2) de l'AVISO Bee Baby peut être réglée par l'interrupteur (1): testez la d'abord à la position ● (médiane) si l'appareil réagit proprement aux pleures de votre baby. La sensibilité s'augmente en glissant l'interrupteur (1) vers la position ● ou se diminue à la position ●.

### 4 Déclencher

Glissez l'interrupteur (1) à la position 0.

Nous recommandons de toujours recharger l'appareil après usage.

### 5 Accumulateur bientôt déchargé

Chargé complètement, AVISO Baby Bee fonctionne environs cinq jours, en fonction de la fréquence des cris affichés.

Quand l'accumulateur devient bientôt vide, tous les AVISO Bee Flash clignotent après chaque cri pendant 5 minutes avec la LED rouge (sur les Flashes).

De même, la LED rouge (4) de l'AVISO Baby Bee clignote toutes les 5 secondes au lieu de la LED verte.