


Anleitung

AVISO Bee Vib (Software Revision V3.xx)

Der **AVISO Bee Vib** ist ein Empfangsgerät mit Vibrationssignal, farbiger LED-Anzeige, Befestigungs-Clip an der Rückseite und aufladbarem Akku.

Voraussetzung: Vorgängig muss ein AVISO Bee System mit mindestens einem AVISO Bee Sendegerät (z.B. Uni -M) und einem AVISO Bee Flash (Empfänger mit Funkrepeater) installiert worden sein.

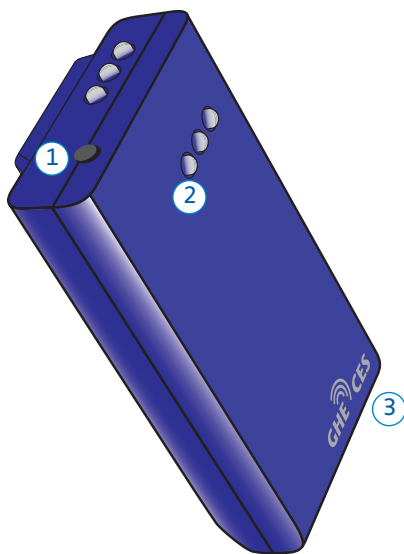

1 Aufladen

Laden Sie den AVISO Bee Vib vor der ersten Inbetriebnahme mit dem mitgelieferten Kabel und dem Netzgerät während mindestens drei Stunden auf:

- Netzgerät an Steckdose anschliessen und dann den kleinen Stecker an der Unterseite in Buchse (3) einstecken. Die rote LED (2) leuchtet während dem Laden dauernd.
- Wenn die rote LED erlischt, ist der Akku voll aufgeladen. Mit voll aufgeladenen Akkus kann der AVISO Bee Vib mehrere Tage betrieben werden, abhängig von der Häufigkeit der Vibrationssignale.

Hinweis: Solange der Vib am Netzteil angeschlossen ist, ist die Vibration deaktiviert.

2 In Betrieb nehmen

(Ein/Aus-)Taste (1) ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis alle LED aufleuchten und der AVISO Bee Vib kurz vibriert. Jetzt kann die Taste (1) losgelassen werden, das Gerät ist eingeschaltet.

Die grüne LED leuchtet auf, danach blinkt die gelbe 1-4x. Falls nach der grünen LED die rote 5x blinkt, ist die Verbindung fehlgeschlagen und der Vib schaltet sich aus. Schalten Sie ihn etwas näher bei einem Flash wieder ein. In Betrieb, leuchtet die grüne LED alle 10 Sekunden ganz kurz auf.

3 Ausschalten

Taste (1) ca. 3 Sekunden gedrückt halten, bis die drei LED's auslöschen und es kurz vibriert. Jetzt ist das Gerät ausgeschaltet.

Es empfiehlt sich, das Gerät nun wieder mit dem Netzgerät aufzuladen, damit es immer einsatzbereit bleibt.

4 Akku bald leer

Wenn der Akku bald leer ist, blinkt die gelbe LED alle 10 Sekunden kurz (anstelle der grünen LED).

5 Standardsignale

	Rot	Gelb	Grün	Vibration
Türe			●	1x
Telefon	●			4x
Baby		●		2x
ViTAB	●	●		4x



Netzgerät


Mode d'emploi

AVISO Bee Vib (Software Revision V3.xx)

AVISO Bee Vib récepteur avec vibreur et affichage LED, avec clip.

Il est alimenté par un accumulateur interne.

Condition d'usage: Il faut au moins un AVISO Bee émetteur et un Flash (récepteur/réémetteur) déjà installé.

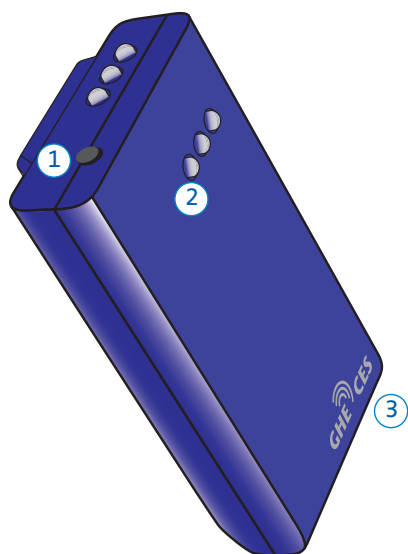

Chargeur (photo peut différer)

1 Charge

Connectez le chargeur au réseau 230 V et enfichez la petite fiche dans la prise (3) en bas de l'AVISO Bee Vib avant la première utilisation (min. 3 heures). La LED rouge (2) brille en continuité.

- L'AVISO Bee Vib est complètement chargé quand la LED rouge commence à clignoter. Chargé totalement, AVISO Bee Vib marche plusieurs jours, en fonction de la fréquence des signaux affichés.

Note: pendant que le Vib est connecté au chargeur, la vibration est coupée.

2 Mise en Service

Pressez le bouton (1) environs 3 secondes, jusqu'à ce que tous les LED's (2) s'allument. Maintenant, le bouton (1) peut être libéré, l'appareil est ainsi enclenché. La LED verte s'allume, puis la LED jaune clignote 1 à 4 fois. Si, après la LED verte, la LED rouge clignote 5 fois (au lieu de la LED jaune), la connection avec un Flash n'a pas pu s'établir. Le Vib se déclenche soi-même. Remettez-le en service plus près d'un Flash. En service, la LED verte clignote toutes les 10 secondes.

3 Déclencher

Tenez presser le bouton (1) environs 3 secondes, jusqu'à ce que tous les LED's (2) s'éteignent. Maintenant, le bouton (1) peut être libéré, l'appareil est ainsi hors service. Nous recommandons de toujours recharger l'appareil après usage.

4 Accumulateur bientôt déchargé

Quand l'accumulateur devient bientôt vide, la LED jaune clignote toutes les 10 secondes (au lieu de la LED verte).

5 Affichage des appels

	rouge	jaune	vert	vibration
Port			●	1x
Téléphon	●			4x
Baby		●		2x
VITAB	●	●		4x