

Mode d'emploi réveil numérique Sonic Traveler L



Sonic Traveler L




avec module lampe

FÉLICITATIONS pour votre achat du "Sonic Traveler L". Ce produit de qualité est conçu pour les personnes ayant besoin d'un réveil doté des fonctionnalités uniques.

AVANT d'utiliser votre appareil, prenez quelques minutes pour lire les instructions suivantes. La compréhension des caractéristiques vous permettra de faciliter les réglages et d'assurer une utilisation efficace.

SOURCE D'ALIMENTATION: Prise d'alimentation et adaptateur universel inclus

- 1) Insérez la fiche du câble d'alimentation (Sortie: DC 5V, 800 mA; entrée 100-240 Volts 50-60 Hz) dans la prise située à l'arrière du réveil, marquée „DC 5V“ .
- 2) Branchez le à une prise électrique murale près de votre lit.
Remarque: 12:00 clignotera sur l'affichage de l'horloge. Lorsque vous réglez l'heure, l'affichage s'arrêtera de clignoter.

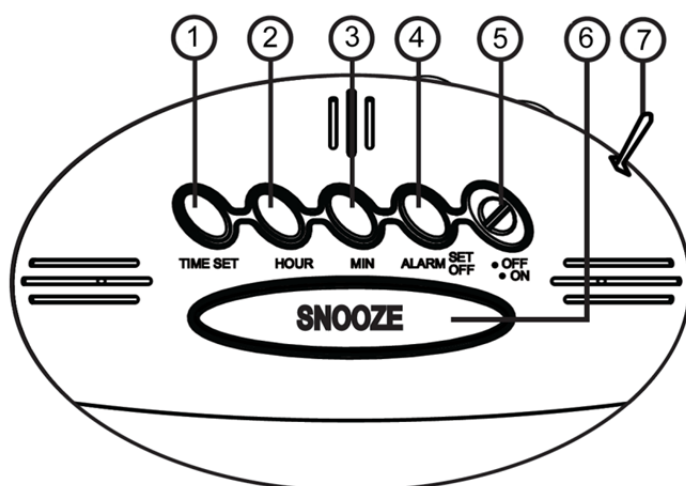

- 1) Réglage de l'heure
- 2) Heures
- 3) Minutes
- 4) Réglage de l'alarme / désactivation
- 5) Arrêt de l'alarme (pour plusieurs jours)
- 6) Rappel d'alarme
- 7) Interrupteur lampe

Réglage de l'heure

- 1) Appuyez simultanément sur les boutons **Time Set (1)** (réglage de l'heure) et **Hour (2)** (heure) et maintenez-les enfoncés pour faire défiler les heures rapidement jusqu'au réglage correct.
- 2) Appuyez simultanément sur les boutons **Time Set (1)** (réglage de l'heure) et **Minute (3)** (minutes) et maintenez-les enfoncés pour faire défiler les minutes jusqu'au réglage correct.


Réglage de l'heure de déclenchement de l'alarme

- 1) Appuyez simultanément sur les boutons **Alarm Set (4) (réglage de l'alarme)** et **Hour (2) (heure)** et maintenez-les enfoncés pour faire défiler les heures rapidement jusqu'au réglage correct.
- 2) Appuyez simultanément sur les boutons **Alarm Set (4) (réglage de l'alarme)** et **Minute (3) (minutes)** et maintenez-les enfoncés pour faire défiler rapidement l'affichage d'alarme jusqu'au réglage correct.

Veillez relâcher les boutons HOUR et MIN avant de relâcher le bouton ALARM.

Sélection du format 12 heures ou 24 heures –

- 1) Appuyez sur le **bouton Hour (heure) (2)** et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour entrer dans le mode de sélection de l'heure; relâchez le **bouton Hour (2)** lorsque l'écran affiche «12H» ou «24H».
- 2) Appuyez sur le bouton de l'heure et relâchez-le pour basculer entre les formats 12 heures et 24 heures. Si aucune sélection n'est faite dans les 4 secondes, le dernier format d'heure s'affichera et l'appareil reviendra en mode horaire normal.

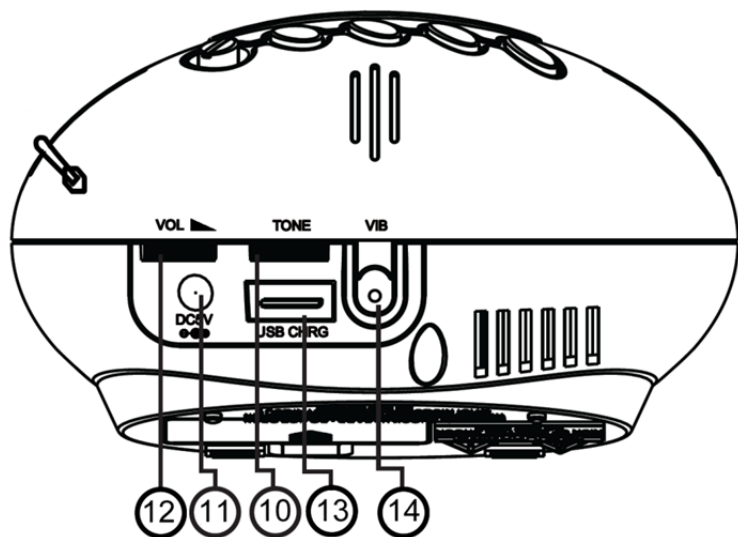

- 10) Tonalité
- 11) Entrée adaptateur réseau 230 V
- 12) Volume de l'alarme
- 13) USB – prise pour charger d'autres appareils
- 14) Entrée module lampe

Les différentes alarmes du réveil

- 1) Réglez le volume de l'**avertisseur sonore** souhaité à l'aide du **bouton de volume (12)**.
- 2) Si la **lampe de chevet** est requis, branchez le module lampe dans la prise **VIB (14)**. Ensuite, débranchez votre lampe de chevet (pas compris), branchez le module lampe à une prise électrique 230 Volt et rebranchez votre lampe de chevet au dos du module lampe. Avec l'interrupteur (7) au dos du réveil, à droite, vous pouvez allumer et éteindre la lampe pour l'usage normal.

L'avertisseur sonore peut être utilisé en même temps avec le module lampe.

ATTENTION: Ne branchez jamais un vibreur à la prise VIB du Sonic Traveler L !

Réglez l'alarme de réveil selon les instructions citées ci-dessus.

Régler la durée de l'alarme

Le paramètre par défaut pour la durée de l'alarme est réglé sur 30 minutes ; vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 59 minutes. Pour régler la durée de l'alarme :

- 1) Appuyez sur le **bouton AL. SET (réglage de l'alarme) (4)** puis maintenez-le enfoncé pendant six secondes. L'écran du réveil montrera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '30', relâchez le **bouton AL.SET**.
- 2) Appuyez sur le bouton **MIN (3)** pour régler la durée de l'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 59 minutes).
- 3) Lorsque la durée d'alarme souhaitée s'affiche à l'écran, l'appareil retourne en mode normal, après trois secondes. Le nouveau paramètre de durée d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

Arrêter l'alarme

L'alarme peut être arrêtée temporairement pour la journée ou de manière permanente.

- 1) Afin que l'alarme s'arrête, appuyez simplement sur le **bouton AL off (4) (arrêt de l'alarme)**. L'alarme s'arrêtera automatiquement pour la journée et sera réactivée le lendemain à la même heure si le réglage de l'alarme n'a pas été modifié.
- 2) Pour arrêter l'alarme de façon permanente, faites glisser le **commutateur de fonction ON/OFF (5)** sur la position off (arrêt). L'alarme ne sera pas réactivée avant d'avoir remis le **commutateur de fonction ON/OFF (5)** sur la position ON.

Fonctionnement du rappel d'alarme

Appuyez sur le bouton **SNOOZE (6)** (rappel d'alarme) après que l'alarme ait retenti.

L'alarme sera désactivée et vous bénéficierez de 9 minutes de sommeil supplémentaire.

L'alarme retentira à nouveau après 9 minutes. Vous pouvez répéter plusieurs fois cette opération, jusqu'à 119 minutes.

Réglage de la durée du rappel d'alarme

Le paramètre par défaut pour la durée du rappel d'alarme est réglé sur 9 minutes, mais vous pouvez régler ce paramètre entre 1 minute et 30 minutes. Pour régler la durée du rappel d'alarme :

- 1) Appuyez sur le **bouton SNOOZE (rappel d'alarme) (6)** et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes. L'écran du réveil affichera la durée d'alarme par défaut sous la forme suivante : '9'. Relâchez le bouton de rappel d'alarme.
- 2) Appuyez sur le bouton **MIN (3)** pour régler la durée du rappel d'alarme sur la valeur souhaitée (entre 1 et 30 minutes).
- 3) Lorsque la durée du rappel d'alarme souhaitée est affichée à l'écran, l'appareil, retourne en mode normal après 3 secondes. Le nouveau paramètre de la durée du rappel d'alarme devient la nouvelle valeur par défaut et restera en mémoire jusqu'à ce que vous le changiez à nouveau.

Volume

Pour régler le volume, faites tourner la molette **de volume (12)** jusqu'au niveau désiré.

Tonalité

Réglez la tonalité en tournant la **molette de tonalité (10)** jusqu'au niveau désiré.

Fonctionnement du variateur

Il existe une fonction de réglage à 5 niveaux de l'écran DEL. Appuyez une fois sur le **bouton SNOOZE (6)** pour modifier la luminosité de l'écran. Le cycle de luminosité de clair à sombre, puis de sombre à clair.

REMARQUE : le variateur ne fonctionne pas si le réveil se trouve en mode de rappel d'alarme.

Chargement USB

Ce réveil est équipé d'un port USB pratique, placé sur le panneau arrière, qui permet de recharger les téléphones portables, lecteurs de disques mobiles et autres appareils portables de plusieurs marques différentes, fournis avec un câble USB. La puissance de sortie du port USB est de 500mA. Pour charger votre appareil, branchez le câble USB, fourni avec votre dispositif portable dans **le port USB (13)** placé sur le panneau arrière de ce réveil. Vérifiez l'indicateur sur votre appareil pour confirmer qu'il est bien en train de se charger.

Remarque : la durée de charge variera en fonction du courant de charge requis par votre appareil. Par conséquent, certains appareils prendront plus de temps à se charger que d'autres.

Batterie de secours

Pour utiliser la batterie de secours, installez une pile alcaline de 9V à la base du réveil, dans le **compartiment des piles (7)**. Veuillez noter qu'en cas de coupure d'électricité, l'écran LED n'affichera plus l'heure, mais l'horloge continuera de fonctionner et affichera l'heure correcte dès que l'appareil sera à nouveau alimenté en électricité.

REMARQUE : pour des résultats optimaux, il est recommandé de changer la batterie tous les 6-8 mois. Si le réveil n'est pas utilisé pendant une longue période, il est recommandé de retirer la pile afin d'éviter les fuites d'acide.

Mode de Test :

- 1) Appuyez sur les boutons Snooze (rappel d'alarme) et Time (réglage de l'heure) et maintenez les enfoncés pendant 3 secondes pour entrer dans le mode de test. L'écran affiche «7ES7» pour indiquer qu'il se trouve en mode TEST.
- 2) Si dans la minute qui suit, aucun bouton n'est pressé, il sortira du mode de test et reviendra en mode de réglage de l'heure.
- 3) Une pression sur un bouton dans la minute qui suit (sauf sur les boutons Snooze (rappel d'alarme) et Time (réglage de l'heure), qui n'ont aucun effet), fera quitter immédiatement l'appareil du mode de test.
- 4) En mode de test, les fonctions du réveil sont affichées, à savoir l'avertisseur sonore, le flash et la lumière (si le module lampe est branché).
- 5) Une fois les opérations du mode test terminées, appuyez sur un bouton quelconque (sauf sur les boutons Snooze (rappel d'alarme) & Time (réglage de l'heure), qui n'ont aucun effet) pour quitter immédiatement ce mode.

GARANTIE LIMITÉE à deux ans:

Votre montre "Sonic Traveler L" est garantie exempte de défauts de matériaux ou de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie est limitée et couvre les fonctions de la montre uniquement. La garantie sera annulée si la montre a été modifiée, altérée, maltraitée ou soumise à des conditions extrêmes pour lesquelles elle n'a pas été conçue, ou si elle a été réparée autrement que par un centre d'entretien qualifié.

La facture vaut comme bulletin de garantie.



Hömelstrasse 17 - CH-8636 Wald ZH - Tél./TS 055 246 28 88 - Fax 055 246 49 49

www.ghe.ch - email info@ghe.ch