

CL Hook 1

Induktionsgeber zu Hörgerät mit T-Spule



Geeignet für Geemarc-Verstärkertelefone, mit dem 3.5mm Adapter auch für andere Tonquellen (nur Induktionsgeber, ohne Mikrofon)

- Verbinden Sie den Stecker des CL Hook 1 mit der Headset-Buchse ihres Telefons (hinten).
- Legen Sie den Nylon-Haken hinter das Ohr neben das Hörgerät.
- Stellen Sie Ihr Hörgerät auf T-Modus.
- Das Gerät ist nun betriebsbereit.
- Das Modell beinhaltet ein Mikrofon (nur für Geemarc-Telefone) für das Telefonieren im Freisprechmodus.
- Um das Mikrofon während eines Telefonats abzustellen, drücken und halten Sie die Stummtaste.
- Lassen Sie die Taste los, um das Gespräch wieder aufzunehmen.
- Mikrofon und Hörer des Telefons sind ausgeschaltet wenn das CL Hook am Telefon angeschlossen ist.