



Minivibrationswecker

Bedienungsanleitung

Plastikstreifen herausziehen, um Batterien in Betrieb zu setzen.

Allg. wenn Sie 30 Sekunden keine Tasten drücken, kehrt das Display zur Uhrzeit-Anzeige zurück.

Zeit einstellen:

1. Drücken Sie MODE bis T.SET im Display erscheint.
2. Mit dem Schalter UP/SNZ stellen Sie die Stunde ein. (PM bedeutet 12 - 24 Uhr)
3. Drücken Sie SET/ALM, um die Stunde zu bestätigen.
4. Nun stellen Sie die Minute mit dem Schalter UP/SNZ.
5. MODE drücken.

Alarm einstellen:

1. Drücken Sie 2x MODE, AL.SET erscheint im Display.
2. Mit dem Schalter UP/SNZ stellen Sie die Stunde ein.
3. Drücken Sie SET/ALM, die Minuten beginnen zu blinken.
4. Nun stellen Sie die Minute mit dem Schalter UP/SNZ.
5. 2x MODE drücken, bis die Uhrzeit erscheint,
6. Drücken Sie SET/ALM, um den Alarm zu aktivieren. Im Display erscheint ein Zeichen, wenn der Alarm aktiviert ist. Der Minivibrationswecker vibriert 1 Minute lang und stellt dann automatisch ab.

Weckwiederholung: Drücken Sie UP/SNZ, um eine Alarmwiederholung nach 4 Minuten einzuschalten. SNZ erscheint im Display. Sie können den Alarm mit allen Tasten stoppen.

Timer:

1. Drücken Sie SET/ALM, um den Alarm einzuschalten (Zeichen erscheint im Display).
2. Drücken Sie MODE bis TIMER im Display erscheint.
3. Drücken Sie SET/ALM, die Stunden beginnen zu blinken. Drücken Sie UP/SNZ, um die Stunden zu stellen.
4. Drücken Sie SET/ALM, die Minuten beginnen zu blinken. Mit UP/SNZ stellen.
5. Drücken Sie SET/ALM, die Sekunden beginnen zu blinken. Mit UP/SNZ stellen.
6. Drücken Sie START, um den Timer zu starten. Wenn Sie nochmals START drücken, stoppt der Timer. Sobald die Zeit abgelaufen ist, vibriert der Wecker 1 Minute lang.
7. Um den Timer wieder auf 0 zu stellen, drücken Sie SET/ALM.

Batterien:

Wenn der Wecker nicht mehr vibriert oder das Display nicht mehr richtig ersichtlich ist, müssen Sie die Batterien ersetzen.

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Ersetzen Sie die Batterien (Typ GPA 76), beachten Sie die Polarität.
3. Schliessen Sie das Batteriefach. Nach 5 Sekunden vibriert der Wecker und das Alarmzeichen erscheint im Display.

Minivibrationswecker

Mode d'emploi

Pour la mise en marche des piles, retirez la bande en plastique.

Avis général : en cas de non-actionnement des touches, l'écran retourne au mode « heure ».

Mise à l'heure:

6. Pressez le bouton MODE jusqu'à T.SET est affiché.
7. Avec le bouton UP/SNZ, réglez les heures. (PM signifie 12 - 24 heure)
8. Confirmez l'heure avec le bouton SET/ALM
9. Maintenant, réglez avec UP/SNZ les minutes.
10. Pour finir, pressez MODE.

Réglage de l'alarme:

7. Pressez deux fois MODE, AL.SET apparaît sur l'écran.
8. Réglez les heures avec UP/SNZ.
9. Confirmez l'heure avec le bouton SET/ALM, les minutes commencent à clignoter.
10. Maintenant, réglez avec UP/SNZ les minutes.
11. Pressez deux fois MODE, jusqu'à ce que l'heure s'affiche.
12. Pressez SET/ALM pour activer l'alarme. Sur l'écran, un sigle apparaît comme témoin lorsque l'alarme est actif. Le Mini-réveil vibre une minute et s'arrête automatiquement.

Répétition de l'alarme: Pressez UP/SNZ pour activer la répétition de l'alarme après 4 minutes. SNZ apparaît dans l'écran. L'alarme peut être arrêté en pressant sur n'importe quel bouton.

Timer:

8. Pressez SET/ALM pour enclencher l'alarme (sigle apparaît sur l'écran).
9. Pressez MODE jusqu'à ce que TIMER apparaît sur l'écran.
10. Pressez SET/ALM, les heures commencent à clignoter. Pressez UP/SNZ pour régler les heures.
11. Pressez SET/ALM, les minutes commencent à clignoter. Réglez avec UP/SNZ.
12. Pressez SET/ALM, les secondes commencent à clignoter. Réglez avec UP/SNZ.
13. Pressez START pour mettre en marche le timer. Si vous pressez encore une fois START, le timer s'arrête. Lorsque le timer est expiré, le réveil vibre une minute.
14. Pour remettre le timer à zéro, pressez SET/ALM.

Piles:

Il est nécessaire de remplacer les piles lorsque l'écran n'est plus bien visible ou lorsque le réveil ne vibre plus.

4. Ouvrez le casier à piles.
5. Remplacez les deux piles (type GPA 76), respectez la polarité !
6. Refermez le casier à piles. Après 5 secondes, le réveil se met à vibrer et le sigle d'alarme apparaît sur l'écran.