

CLA40

Telefonhörverstärker mit Zusatzverstärkung



Benutzerhandbuch

Warnung: Dieses Gerät wurde speziell für schwerhörige Personen konzipiert und besitzt eine auf die individuellen Bedürfnisse einstellbare Hörerlautstärke. In Folge dessen sollten alle Nutzer darauf achten, dass der Lautstärkereglер des Hörers, in Rücksicht auf andere Nutzer, auf das niedrigste Niveau gestellt wird. Es ist darauf zu achten, dass unwissende Benutzer mit der Handhabung dieser Apparatur vertraut gemacht werden.


Inhaltsverzeichnis

BESCHREIBUNG CLA40	4
INSTALLATION	8
EINSTELLUNGEN	9
Einstellen der Lautstärke	9
Einstellen der Höhen und Tiefen	9
Verstärkertaste	9
Batterieanzeige	9
FEHLERBESEITIGUNG	10
GARANTIE	11
WANDMONTAGESCHABLONE	16



Beschreibung CLA40

OBERSEITE

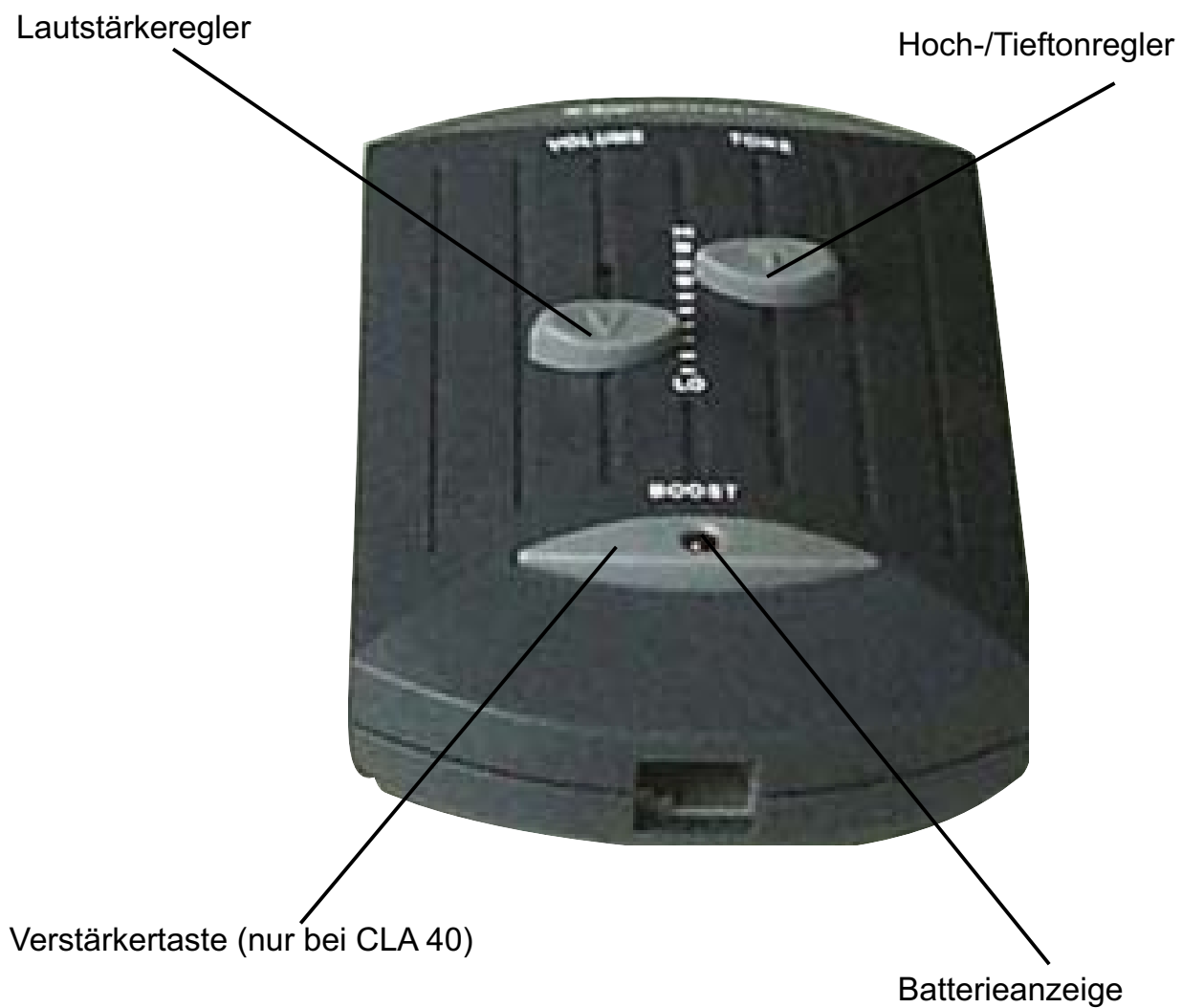

Beschreibung CLA40

UNTERSEITE



Beschreibung CLA40

RÜCKSEITIGE ANSICHT



Eingang für Anschluss des Telefons (1)
(klassifiziert TNV-2 gemäß des EN60950 Standard)

Beschreibung CLA40

VORDERSEITIGE ANSICHT



Ausgang für Anschluss des Hörers (2)
(klassifiziert TNV-2 gemäß des EN60950 Standard)

Installation

1 – EINSETZEN DER BATTERIE

Der CLA40 Verstärker wird mit einer 9V Blockbatterie betrieben. Um die Batterie in den Verstärker einzusetzen folgen Sie bitte den nachfolgenden Anweisungen:

- Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite durch Drücken des kleinen Plastikverschlusses.
- Setzen Sie die 9V Batterie mit der richtigen Polarität in das Batteriefach ein.
- Schließen Sie das Batteriefach
- Der Verstärker ist nun betriebsbereit, um an das Telefon angeschlossen zu werden.

2 – VERBINDUNG DES CLA40 VERSTÄRKERS MIT DEM TELEFON

Um Ihr Telefon an den CLA 40 Verstärker anzuschließen, folgen Sie bitte den nachfolgenden Anweisungen:

- Ziehen Sie das Hörerkabel aus dem Telefon
- Verbinden Sie das kurze Kabel, welches Sie zusammen mit dem CLA40 erhalten haben, mit dem Telefon, sowie mit dem CLA40 Anschluss (1) auf der Rückseite.

Installation

- Verbinden Sie das Hörerkabel mit dem CLA40 Anschluss (2) auf der Vorderseite
- Nach wenigen Sekunden leuchtet die Batterieanzeige auf

WICHTIG:

Wenn Sie kein Freizeichen erhalten, verändern Sie die Stellung des auf 12 Positionen einstellbaren Drehreglers auf der Unterseite. Mit diesem Regler kann der CLA40 an die meisten auf dem Markt erhältlichen Telefone angepasst werden. Hierfür folgen Sie bitte den nachfolgenden Anweisungen:

- Legen Sie den Hörer zurück auf die Telefongabel
- Stellen Sie den Regler so ein, dass Sie bei erneutem Abheben einen Freiton erhalten
- Das CLA40 ist nun betriebsbereit

Einstellungen

Achtung: Der CLA40 kann nicht mit Telefonen benutzt werden, deren Tastenfeld sich im Hörer befindet.

3 – EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE

Mit dem „Lautstärke“-Regler auf der Oberseite können Sie die Lautstärke einstellen. Die Lautstärke kann auf bis zu +30 dB angehoben werden.

4 – EINSTELLEN DER HÖHEN UND TIEFEN

Mit dem Hoch-/Tiefenregler auf der Oberseite können Sie die Höhen und Tiefen anpassen. Dies erfolgt in 5 dB Schritten, ausgehend von 0 dB in der Mitte. Mögliche Einstellungen sind -10 dB, -5 dB, 0 dB für Tiefen und 0 dB, -5 dB, -10 dB für Höhen. Dies kann bei jeder Lautstärkeeinstellung erfolgen.

5 – VERSTÄRKERTASTE (BOOST)

Bei Bedarf können Sie die Lautstärke um bis zu 10 dB und mehr erhöhen, indem Sie die Verstärkertaste (Boost) drücken und halten.

Einstellungen

6 – BATTERIEANZEIGE

Wenn Sie Ihr Telefon mit dem CLA40 benutzen, leuchtet die Batterieanzeige auf, um anzuzeigen, dass die Batterie voll ist. Wenn die Anzeige nicht aufleuchtet, muss die Batterie ausgewechselt werden.

WICHTIG: Trennen Sie den CLA40 immer vom Telefon, bevor Sie die Batterie entfernen.

Fehlerbeseitigung

WENN DER CLA40 NICHT FUNKTIONIERT

- Stellen Sie sicher, dass sämtliche Verbindungen vorschriftsmäßig an die dafür vorgesehenen Anschlüsse angeschlossen sind (Telefonkabel, Verstärkeranschlüsse).
- Stellen Sie sicher, dass die Batterie mit der richtigen Polarität eingelegt wurde und dass sie voll aufgeladen ist.

Sollten Sie dennoch Probleme haben, den CLA40 zu benutzen, gehen Sie nach folgenden Anweisungen vor:

- Trennen Sie den Verstärker vom Telefon.
- Verbinden Sie den Hörer mit dem Telefon.
- Wenn das Problem aufhören sollte, ist der Verstärker defekt.
- Wenn das Problem weiterhin bestehen sollte, so liegt das Problem bei Ihrem Telefon oder bei Ihrem Telefonanschluss.

Fehlerbeseitigung

In diesem Fall müssen Sie Ihre Telefongesellschaft über das Problem informieren oder Ihr Telefon zur Reparatur bringen.

WICHTIG: Der CLA40 kann nicht im Zusammenhang mit einem Telefon benutzt werden, welches mit einem Tastenfeld auf dem Hörer versehen ist. Der CLA-40 kann lediglich mit standardisierten Telefonen ohne Verstärker- oder Tonregulierung verwendet werden.




Wandmontageschablone

WANDMONTAGESCHABLONE

Wenn Sie den Verstärker an der Wand aufhängen möchten, benutzen Sie diese Vorlage, um die Löcher in die Wand zu bohren.

Bohren Sie in der Mitte der angegebenen Löcher

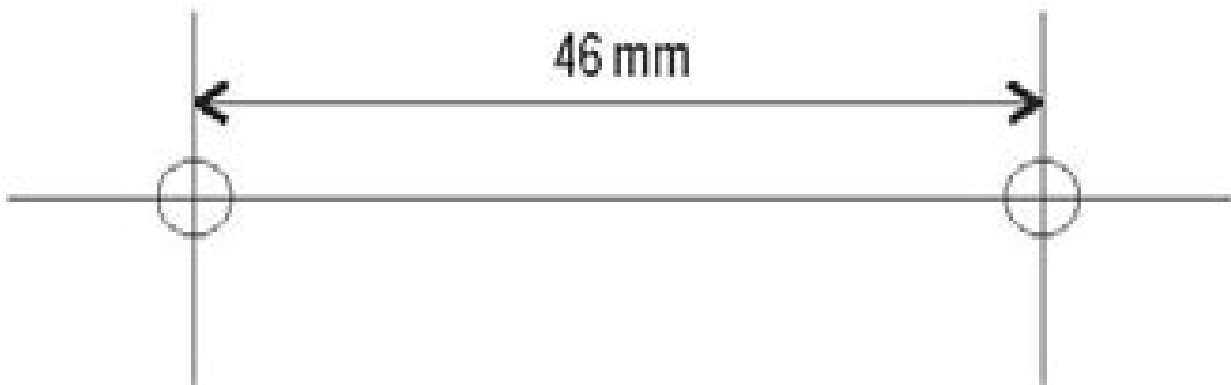

Garantie

GARANTIE

Auf dieses Gerät gewähren wir bei Herstellungsmängeln 1 Jahr Garantie ab Rechnungsdatum. Sie deckt nur Mängel, die trotz bestimmungsgemäsem Gebrauch auftreten. Ausdrücklich von der Garantie ausgenommen sind Schäden infolge Überspannung, Blitzschlag und mechanische Einwirkungen. Bevor Sie bei auftretenden Problemen das Gerät an uns einsenden, bitten wir Sie, während den Bürozeiten unseren Kundendienst anzurufen.

KUNDENDIENST



Kommunikationssysteme für Hörgeschädigte
Hömelstrasse 17
CH-8636 Wald ZH
Telefon/Telescrit 055 246 28 88
Fax: 055 246 49 49
email: info@ghe.ch, www.ghe.ch