

# Gebrauchsanleitung

# Telescrit 2108



Hömelstr. 17 - CH-8636 Wald ZH - Telefon/TS 055-246 28 88 - Fax 055-246 49 49  
E-Mail: [info@ghe.ch](mailto:info@ghe.ch) - [www.ghe.ch](http://www.ghe.ch)

Sehr geehrte Kundin  
Sehr geehrter Kunde

Das Telescrit ist ein modernes, kompaktes Schreibtelefon für den Einsatz zu Hause und unterwegs. Telefonieren mit dem Telescrit ist einfach. Diese Gebrauchsanleitung hilft Ihnen, die vielfältigen Möglichkeiten des Schreibtelefons zu nutzen. Sie werden sehen, dass verschiedenste Funktionen das Telefonieren bequem und komfortabel machen.

Zur Gliederung der Anleitung: In der mittleren Seitenspalte steht der eigentliche Text, rechts davon finden Sie Seitenhinweisen für weiterführende Beschreibungen oder verwandte Themen. In der Spalte links sind die Tastenfunktionen aufgeführt. Diese Spalte ist vor allem auch für späteres Nachschlagen bestimmter Tastenkombinationen sehr hilfreich.

Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen beim Lesen und Telefonieren.



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Installation</b>	<b>5</b>
1.1	Anschluss ans Stromnetz	5
1.2	Anschluss ans Telefonnetz, Direktanschluss	5
<b>2.</b>	<b>Ein- und Ausschalten des Telescrits</b>	<b>5</b>
2.1	Einschalten	5
2.2	Ausschalten	5
<b>3.</b>	<b>Die Infozeile</b>	<b>6</b>
3.1	Kontroll-Zeichen in der Infozeile	6
<b>4.</b>	<b>Sie rufen jemanden an</b>	<b>6</b>
<b>5.</b>	<b>Automatische Wahl der Telefonnummer</b>	<b>7</b>
5.1	Wahlwiederholung	8
5.2	Wahl aus Ihrer Telefonnummernliste	8
<b>6.</b>	<b>Jemand ruft Sie an</b>	<b>8</b>
<b>7.</b>	<b>Die Anzeige</b>	<b>9</b>
7.1	4-zeilige oder 8-zeilige Anzeige	9
7.2	Grossbuchstaben, Gross- und Kleinbuchstaben	10
7.3	Ein- und Ausschalten der Anzeigebeleuchtung	10
<b>8.</b>	<b>Anrufbeantworter</b>	<b>10</b>
8.1	Einschalten des Anrufbeantworters	10
8.2	Eingabe von Zeit und Datum	11
<b>9.</b>	<b>Rufton für Hörende</b>	<b>12</b>
<b>10.</b>	<b>Verschiedene Speicher im Telescrit</b>	<b>12</b>
<b>11.</b>	<b>Festspeicher</b>	<b>14</b>
11.1	Schreiben von Sätzen in den Festspeicher	14
11.2	Programmieren der persönlichen Ansage für den Anrufbeantworter	14
11.3	Lesen der einprogrammierten Sätze	15
11.4	Senden der einprogrammierten Sätze	15
11.5	Löschen der einprogrammierten Sätze	16
11.6	Löschen aller Sätze im Festspeicher	17
<b>12.</b>	<b>Telefonnummernspeicher</b>	<b>17</b>
12.1	Eingabe von Namen und Telefonnummern	17
12.2	Lesen in der Telefonnummernliste	18
12.3	Löschen eines Namens und einer Telefonnummer	18
12.4	Löschen der gesamten Telefonnummernliste	19
<b>13.</b>	<b>Anrufspeicher</b>	<b>19</b>
13.1	Lesen der Anrufe	19
13.2	Löschen der Anrufe	20
13.3	Löschen Ihres gesamten Anrufspeichers	20


<b>14. Schreibspeicher</b>	<b>20</b>
14.1 Lesen des Schreibspeichers	21
14.2 Lesen des Schreibspeichers während des Telefonierens	21
<b>15. Vorbereitungsspeicher</b>	<b>21</b>
<b>16. Speichern von Gesprächen</b>	<b>21</b>
16.1 Speichern eines Telefongesprächs oder einer vorbereiteten Meldung im Schreibspeicher	22
16.2 Speichern eines Telefongesprächs im Anrufspeicher	22
<b>17. Das Menu</b>	<b>22</b>
17.1 Menufunktionen	22
<b>18. V21/V22</b>	<b>23</b>
18.1 Anruf mit V21/V22	24
18.2 Sie werden mit V21/V22 angerufen	25
18.3 Doppelte Buchstaben, Echo ein/aus	25
<b>19. Option Computeranschluss</b>	<b>25</b>
19.1 Installation von Telescrit und PC	26
<b>20. Option Druckeranschluss zu Telescrit 2002/2108</b>	<b>27</b>
20.1 Installation von Telescrit und Drucker	28
20.2 Ausdruck von Schreibtelefongesprächen	28
20.3 Nachträgliches Ausdrucken	33
<b>21. Zusammenfassung von Tastenkombinationen</b>	<b>30</b>
<b>22. Stichwortverzeichnis</b>	<b>31</b>

#### Garantiebestimmungen:

Die Garantie beträgt 1 Jahr ab Rechnungsdatum. Nicht unter die Garantie fallen unsachgemässe Behandlung und Überspannung auf dem Stromnetz. Die Garantie entfällt, wenn das Gerät geöffnet wurde.

# 1. Installation

Batteriebetrieb S.6

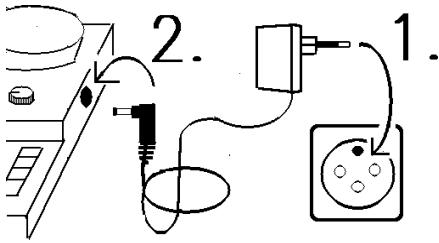


## 1.1 Anschluss ans Stromnetz

Stecken Sie das Ladegerät in eine Steckdose 220 Volt (1). Schieben Sie den kleinen Stecker des Ladegeräts in die Buchse „Stromanschluss“ (2) hinein.

Lassen Sie das Telescrit möglichst immer am Strom angeschlossen. Die Batterien halten so länger.

Achtung: Immer zuerst kleiner Stecker aus der Buchse „Stromanschluss“ herausziehen und dann erst Netzgerät von der Steckdose wegnehmen. Die Batterie entlädt sich, wenn das Netzgerät ausgesteckt wird, der kleine Stecker jedoch in der Buchse bleibt.

## 1.2 Anschluss ans Telefonnetz, Direktanschluss

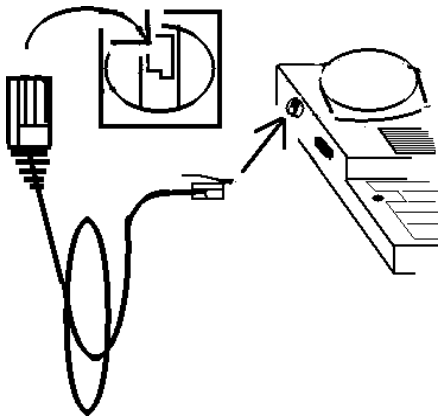

Stecken Sie den grossen Stecker des Telefonkabels in die Telefonsteckdose oder in den Doppelstecker zur Aviso-Anlage.

Stecken Sie den kleinen Stecker des Telefonkabels beim „Telefonanschluss“ ein.

## 2. Ein- und Ausschalten des Telescrits

### 2.1 Einschalten



Drehknopf nach rechts drehen bis die Info-Zeile gut lesbar ist. Der Drehschalter regelt die Helligkeit und den Kontrast der Anzeige.

### 2.2 Ausschalten

Drehknopf ganz nach links drehen. Die Anzeige erlischt.

Ist das Telescrit eingeschaltet, erscheint die Info-Zeile.

Infozeile S. 6

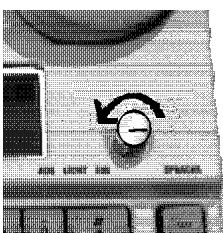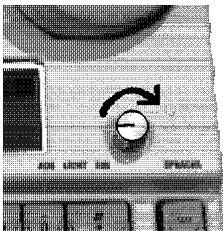

L:21 EDT MEM:0751 00:00:49

HALLO.....  
HIER IST.....  
.....

### 3. Die Infozeile

Die Infozeile gibt wichtige Informationen. Sie ist die Linie 00. Auf ihr kann nicht geschrieben werden.

L: 21 „L“ bedeutet Linie. „21“ ist die Nummerierung der Linien eines Telefongesprächs.

EDT bedeutet: Der Schreibtelefonmodus ist eingeschaltet.

MEM bedeutet Speicher. MEM 0751 bedeutet, im Speicher hat es noch für 751 Linien Platz.

00:00:49 Das ist eine Zeitangabe. Sie bedeutet, dass das Telescrit vor 49 Sekunden eingeschaltet wurde.

Schreibspeicher  
S.21

SSM-Modus S.27  
V21/V22 S. 29

Anrufbeantworter  
S. 11

#### 3.1 Kontrollzeichen in der Infozeile

Neben der Zeilenzahl erscheinen manchmal Kontrollzeichen. Mit Hilfe dieser Zeichen können Sie einige Funktionen überwachen.

\$-Zeichen zeigt den Signalton des Telefons an. Wenn jemand spricht flackert das \$-Zeichen.

SEND erscheint, wenn Ihr Telescrit Buchstaben oder den Rufton sendet. Es erscheint auch, wenn Sie aus einem Speicher senden.

BATT erscheint, wenn die Telescrit Batterie in ca. 30 Minuten entladen sein wird. Bitte schliessen Sie das Telescrit ans Ladegerät.

Anschluss ans  
Stromnetz S. 5



### 4. Sie rufen jemanden an

Telescrit einschalten

Telefontaste drücken

Unterhalb der Zeile 0 erscheint folgender Text:

Telefonno. oder Buchstabe, dann\*

Wahlwiederholung  
S. 7

z.B.  
055 246 28 88



Hier GHE... \*\*



oder



Tippen Sie auf der Telescrittastatur die Telefonnummer ein.

Müssen Sie eine Amtsholnummer einstellen damit Sie in einem Gebäude (Hotel, Geschäft) nach draussen telefonieren können tippen Sie nach der Amtsholnummer ein „W“.. z. B.

OW055 246 28 88

Drücken Sie die Sterntaste.

Die kleine Lampe leuchtet rot auf. Die Telefonleitung wird belegt. Das Telscrit wählt die Nummer.

Auf der Anzeige steht: Wählt

Das Zeichen \$\$\$\$ in der Info-Zeile blinkt langsam (4-Sekunden Intervall). Bei der angerufenen Person blinkt jetzt die Aviso-Anlage.

Warten Sie bis der/die Angerufene schreibt. Ist der gewählte Anschluss besetzt, fragt das Telescrit:

Besetzt, nochmals wählen? J/N

Wollen Sie nochmals anrufen, drücken Sie die Taste „J“.

Wollen Sie nicht mehr anrufen, drücken Sie die Taste „N“ und schalten das Telescrit aus.

## 5. Automatische Wahl der Telefonnummer

### 5.1 Wahlwiederholung

Auf der Anzeige steht:

Telefonno. oder Buchstabe,dann\*

Drücken Sie die Sterntaste.

Auf der Anzeige erscheint die Telefonnummer, die Sie zuletzt eingestellt haben.

Drücken Sie die Sterntaste.

Die angezeigte Nummer wird gewählt.

Wahl aus der telefonnummernliste S. 8

Telefonieren mit dem Akustikoppler S. 11, S. 12

Sie rufen an S. 6

## 5.2 Wahl aus Ihrer Telefonnummernliste

Erstellen einer  
Telefonnummern-  
liste S. 17



Drücken Sie die Telefontaste.

Auf der Anzeige steht:


Telefonno. oder Buchstabe, dann\*

z.B.



Geben Sie den Anfangsbuchstaben  
des Namens der Person ein, mit der  
Sie telefonieren wollen.

Auf der Anzeige erscheint Ihre Telefon-  
liste. Der erste Name mit dem Anfangs-  
buchstaben, den Sie eingegeben haben,  
ist mit einem dunklen Balken bezeich-  
net.

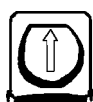

oder



Drücken Sie die Zeilenwechseltaste.

Der schwarze Balken wechselt zum  
nächsten Namen. Mit den Zeilen-  
wechseltasten können Sie Ihre Liste  
durchgehen.

Bezeichnen Sie den Namen der Per-  
son, die Sie anrufen möchten, mit dem  
schwarzen Balken

Drücken Sie die Sterntaste.



Das Telescrit stellt die Nummer, die mit  
dem schwarzen Balken bezeichnet ist  
ein.

## 6. Jemand ruft Sie an

Das Telefonsignal Ihrer Lichtsignal-  
anlage blinkt.

Schalten Sie das Telescrit ein.

Die rote Lampe am Telescrit blinkt. Sie  
zeigt an, dass Ihr Telefon läutet.

Drücken Sie die Telefontaste und  
dann die Leertaste.

Die rote Lampe leuchtet. Die Telefon-  
verbindung ist hergestellt.

Schreiben Sie Ihren Namen und dann  
zwei Sterne\*\*.

Das heisst: Der/die andere soll schreiben.



Paul Namenlos\*\*



**Eine bewährte Regel:  
Der/die Angerufene schreibt immer  
zuerst.**

Auch während des Gesprächs bedeuten zwei Sterne, dass der andere nun schreiben kann.

Gespräch beenden:

Wenn Sie vier Sterne schreiben bedeutet das, dass Sie das Gespräch beenden wollen.

Am Ende des Gesprächs drücken Sie die Telefontaste.


Das Telescrit fragt:  
Verbindung abbrechen?

Drücken Sie die Sterntaste.

Die rote Lampe erlischt, die Telefonleitung ist nicht mehr belegt.

Schalten Sie das Telescrit aus.

...auf Wieder-  
schreiben\*\*\*\*


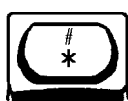


## 7. Die Anzeige

### 7.1 Sie können wählen zwischen 4-zeiliger Anzeige oder 8-zeiliger Anzeige

Wechseln Sie die Zeilenanzahl vor dem Telefongespräch. Wenn Sie die Zeilenanzahl wechseln, wird der Text im Schreibspeicher gelöscht und das Gespräch unterbrochen.

Schreibspeicher  
S. 13 / S. 21

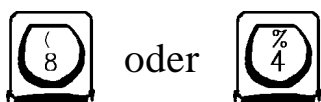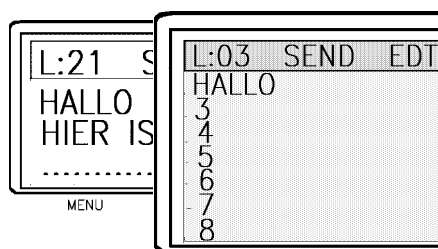

Wechseln von 4 Zeilen auf 8

Drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste „4“.

Drücken Sie die Taste „A“.

Drücken Sie die Taste „8“.

Wechseln von 8 Zeilen auf 4: CTRL-Taste gleichzeitig Taste „4“, Taste „A“, Taste „4“

## 7.2 Grossbuchstaben, Gross- und Kleinbuchstaben



Wollen Sie Ihren Text in Grossbuchstaben schreiben, drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste „G“



Wollen Sie Ihren Text in Gross- und Kleinbuchstaben schreiben, drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste „K“.

Umschalten von Gross- auf Kleinbuchstaben können Sie auch während des Telefonierens.



## 7.3 Anzeigebeleuchtung

Drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig die Sterntaste, die Beleuchtung ist eingeschaltet.



Drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste „0“ die Beleuchtung erlischt.

Wenn Sie das Telescrit eingeschaltet haben, aber nichts schreiben oder empfangen, erlischt die Beleuchtung nach einiger Zeit.

## 8. Anrufbeantworter

Anrufspeicher  
S. 19

Der Anrufbeantworter nimmt Anrufe automatisch entgegen. Bevor Sie den Beantworter einschalten, können Sie Uhrzeit und Datum ins Telescrit eingeben, bei jedem Anruf wird Datum und Uhrzeit in die erste Zeile geschrieben.

### 8.1 Einschalten des Anrufbeantworters


Telescrit einschalten.

Drücken Sie die Beantwortertaste.

Drücken Sie die Sterntaste.

Die Anzeigebeleuchtung erlischt. Auf Zeile eins steht:

Beantworter:AnzahlAnrufe:00

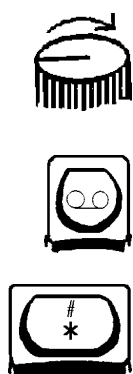

Die Zahl nach dem Doppelpunkt zeigt Ihnen, wieviele Anrufe Sie bereits im Anrufspeicher abgelistet haben. Wenn Sie nach Hause kommen, sehen Sie wieviele Anrufe Sie erhalten haben. Der Beantworter ist nun bereit, Anrufe automatisch entgegenzunehmen. Wenn Sie den Beantworter wieder ausschalten wollen, drücken Sie die START-Taste.

Programmieren der persönlichen Ansage für den Anrufbeantworter S. 14



## 8.2 Eingabe von Zeit, Datum

Drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig Taste "5".



Auf der Anzeige erscheint:  
Zeit/Tag eingeben: HH:MM:SSS TT

Infozeile S. 6

Geben Sie die Stunden ein.

Sie müssen immer zwei Stellen eingeben.



Drücken Sie die Leertaste, geben Sie die Minuten ein.



Drücken Sie die Leertaste, geben Sie die Sekunden ein.



Drücken Sie die Leertaste, geben Sie das Datum ein.

## 9. Rufton für Hörende

Wenn Sie das Telescrit einschalten, ertönt alle 2 Sekunden ein Rufton, solange Sie nicht schreiben. In der Info-Zeile erscheint das Kontroll-Zeichen "SEND". Der Hörende erkennt dank dem Rufton, dass ihn eine gehörlose Person mit Telescrit anruft.

## 10. Verschiedene Speicher im Telescrit

Es gibt drei Gruppen von Speichern:

1. Festspeicher,
2. Telefonnummernspeicher und

Anrufspeicher,  
3. Schreibspeicher und  
Vorbereitungsspeicher.  
Gruppe 2 und 3 sind miteinander “ver-  
wandt“. In ihnen können insgesamt 750  
Zeilen abgespeichert werden



### **Festspeicher**

35 verschiedene Sätze können gespei-  
chert werden. Die Sätze bleiben gespei-  
chert, auch wenn Sie das Telescrit ab-  
schalten.

Festspeicher  
S. 14

### **Telefonnummernspeicher**

Wenn Sie das Gerät ausschalten bleiben  
die Namen und Nummern gespeichert.  
Je mehr Adressen Sie gespeichert ha-  
ben,  
desto kleiner wird aber der Schreib-  
speicher.

Telefonnummern-  
speicher S. 17  
Wahl aus der  
Telefonnummern-  
liste S.8

### **Anrufspeicher**

Wenn Sie den Beantworter eingeschal-  
ten haben, dann werden die Anrufe in  
diesem Speicher aufgeschrieben. Je  
mehr Anrufe Sie aufgezeichnet haben  
desto kleiner wird der Schreibspeicher.  
Wenn Sie das Telescrit ausgeschalten  
haben, bleiben die Anrufe gespeichert.

Anrufspeicher  
S. 19  
Anrufbeantworter  
S. 10

### **Schreibspeicher**

Der Schreibspeicher zeichnet Ihr Tele-  
fongespräch auf. Bis zu 750 Zeilen kann  
der Speicher aufzeichnen, sofern Anruf-  
und Telefonnummernspeicher leer sind.

Schreibspeicher  
S. 21.

### **Vorbereitungsspeicher**

Hier können Sie eine Meldung vorberei-  
ten, die Sie Ihrem Gesprächspartner  
schnell übermitteln wollen. Vorberei-  
tungsspeicher und Schreibspeicher wer-  
den automatisch gelöscht, wenn Sie das  
Telescrit ausschalten. Wenn Sie wollen,  
können Sie den Text trotzdem spei-  
chern.

Vorbereitungs-  
speicher S. 22

Speichern von  
Gesprächen S. 22

## 11. Festspeicher

Im Festspeicher können Sie 35 Sätze einprogrammieren. Z. B. „Hier ist Paul Namenlos“ oder „Danke, auf Wieder-schreiben.“ Das Telescrit speichert die Sätze, bis Sie sie löschen.

Festspeicher  
S. 14

### 11.1 Schreiben von Sätzen in den Festspeicher



Drücken Sie die Umschalttaste und gleichzeitig die Satz-taste.

In der Info-Zeile erscheinen die beiden Buchstaben SA

Geben Sie eine Zahl von 1-9 oder einen Buchstaben (nicht ä, ö, ü) ein. Sie geben dem Satz, den Sie speichern wollen ein Kennzeichen. Geben Sie als Kennzeichen eine Zahl ein, haben Sie pro Zahl zwei Linien zur Verfügung. Geben Sie als Kennzeichen einen Buchstaben ein, haben Sie pro Buchstaben eine Zeile zur Verfügung.

Zahl 0 (Kennzeichen) als Adresse im Festspeicher ist für den Beantworter reserviert  
Punkt 12.2

z. B.



Bsp: Sie drücken die „1“ Auf Zeile eins erscheint:

Festspeicher neu programmieren

Hallo, hier ist Paul\*\*

Schreiben Sie nun Ihren Text. z. B. „Hallo, hier ist Paul... „

Drücken Sie die START- oder die SATZ-Taste.




„Hallo, hier ist Paul...“ steht unter der Nummer 1 (Adresse) im Festspeicher.


### 11.2 Programmieren der persönlichen Ansage für den Beantworter

Wenn Sie den Beantworter eingeschaltet haben und jemand ruft an, meldet sich Ihr Anrufbeantworter mit einem Ansagetext, der bereits von uns einprogrammiert ist. Sie können jedoch diesen Ansagetext ändern.

Anrufbeantworter  
S. 10  
Anrufspeicher  
S. 19

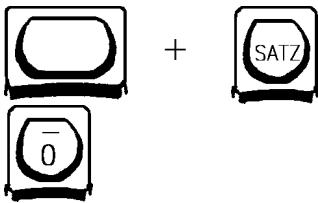

Hier ist der Anrufbeantworter von Paul..

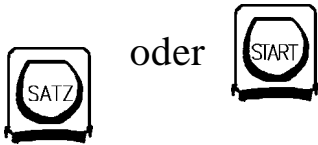

Drücken Sie die Umschalttaste und gleichzeitig die SATZ-Taste.


Drücken Sie die Taste „0“

Schreiben Sie nun Ihren Ansagetext.

Drücken Sie die SATZ- oder START-Taste.

Ihre persönliche Ansage für den Anrufbeantworter ist nun im Festspeicher gespeichert. Sie wird gesendet, wenn Ihnen jemand telefoniert, und Sie den Beantworter eingeschaltet haben.

### 11.3 Lesen der einprogrammierten Sätze

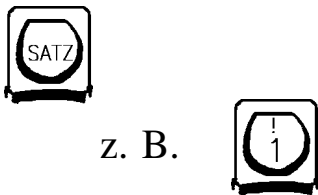

Drücken Sie die SATZ-Taste.

In der Info-Zeile erscheint SA.

Drücken Sie z.B. die „1“.

Ihr einprogrammierter Satz  
Hallo hier ist Paul ...

erscheint auf der Anzeige.




Drücken Sie nun wieder die SATZ-Taste.

Sie sind nicht mehr im Festspeicher.  
Um Ihre Ansage für den Anrufbeantworter zu lesen,

drücken Sie die SATZ-Taste und dann die Taste „0“.

### 11.4 Senden der einprogrammierten Sätze

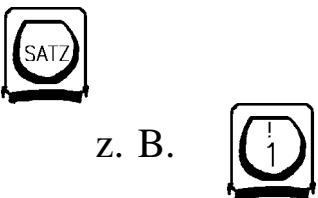

Drücken Sie die Satz-taste.

Drücken Sie das Kennzeichen des Satzes, den Sie senden wollen (eine Zahl oder einen Buchstaben).

Das Kennzeichen für den Satz „Hallo hier ist Paul...“ ist die „1“. Wenn Sie also diesen Satz senden wollen, drücken Sie die „1“. Der Satz erscheint auf der Anzeige.

Drücken Sie die START-Taste.

Sie rufen jemanden an S. 6  
Jemand ruft Sie an S. 8



Das Telescrit sendet den einprogrammierten Satz automatisch Ihrer Gesprächspartnerin.

Das Telescrit sendet den einprogrammierten Satz automatisch Ihrer Gesprächspartnerin.

Mögliche Sätze zum Einprogrammieren:

1 Guten Tag, hier ist Paul Namenlos.\*\*

2 Guten Abend, hier ist Paul Namenlos.\*\*

3 Meine Adresse lautet: Paul Namenlos, Feldweg 1, 8000 Zürich. Tel.Nr. 234 56 87.

4 Ich bin im Geschäft erreichbar unter Telefonnr. 01 234 50 01

5 Vielen Dank für Deinen Anruf und auf Wiederschreiben.\*\*\*\*

Es kann nützlich sein, wenn Sie eine Liste Ihrer einprogrammierten Sätze erstellen. Sie sehen dann zu welcher Kennzahl welcher Satz gehört.

### 11.5 Löschen eines einprogrammierten Satzes

Lesen Sie zuerst den Satz, den Sie löschen wollen, und merken Sie sich seine Adresse (Kennzahl).

Lesen der einprogrammierten Sätze  
S. 15



+



z. B.



Drücken Sie die Umschalttaste und zugleich die SATZ-Taste.

Geben Sie das Kennzeichen (=Zahl oder Buchstaben) ein,

das zum Satz gehört, den Sie löschen wollen. Z.B. Das Kennzeichen „1“: Sie wollen den Satz „Hallo, hier ist Paul“ aus dem Festspeicher löschen.

Auf Zeile eins erscheint:

Festspeicher neu programmieren

Drücken Sie die START- oder SATZ-Taste.



oder



Sie sind nicht mehr im Festspeicher. Der Satz zum Kennzeichen „1“ ist gelöscht. Sie können unter der Adresse „1“ einen neuen Satz einprogrammieren.

Schreiben von Sätzen in den Festspeicher S. 14

## 11.6 Löschen aller Sätze im Festspeicher



Drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig Taste „4“.

Sie befinden sich nun im Menu des Telescrits.

Menufunktionen  
S. 25



Drücken Sie die Taste „L“.



Drücken Sie die Taste „F“.

Löschen des  
Telefonnummern-  
speichers S. 19



Drücken Sie die Sterntaste.

Auf der Anzeige erscheint:  
löschen ? ( J )

Löschen des Anruf-  
speichers S. 20



Drücken Sie die Taste „J“

Wollen Sie den Speicher nicht löschen, drücken Sie an Stelle der Taste „J“ die Sterntaste.

Drücken Sie die Sterntaste.




Alle Sätze im Festspeicher sind jetzt gelöscht.

Schreiben von  
Sätzen in den  
Festspeicher S. 14

## 12. Telefonnummernspeicher

### 12.1 Eingabe von Namen und Telefonnummern

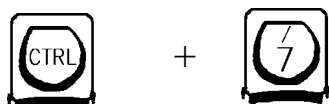

Drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste „7“.

Wahl aus Ihrer  
Telefonnummern-  
liste S. 8

Auf Zeile eins erscheint:  
Neuer Name eingeben:


Geben Sie den gewünschten Namen ein  
(maximal 20 Buchstaben).



Drücken Sie die Sterntaste.

Auf Zeile eins erscheint:  
Neue Telefonnummer eingeben.

Geben Sie die Telefonnummer ein, die zum vorher eingegebenen Namen gehört. Schreiben Sie auch die Vorwahl (z.B. 01 ), wenn es nötig ist. Geben Sie die Nummer genau gleich ein, wie wenn Sie sie mit dem Telescrit oder Telefon einstellen, das gilt auch für die Amtsholnummer.

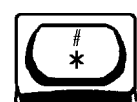

Drücken Sie die Sterntaste

Name und Telefonnummer sind im Festspeicher einprogrammiert.


Amtsholnummer  
S. 7




## 12.2 Lesen der Telefon-nummern- liste




+

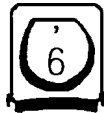

z.B.

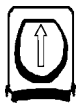

oder

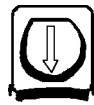

Drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig Taste "6".  
Auf der Anzeige steht:  
Eingabe erster Buchstabe des Namens  
Geben Sie den Anfangsbuchstaben eines Namens in Ihrer Liste ein.

Wahl aus Ihrer  
Telefonnummern-  
liste S. 8

Auf der Anzeige erscheint die  
Telefonnummernliste. Der Name mit  
dem eingegebenen Anfangsbuchstaben  
ist mit einem schwarzen Balken be-  
zeichnet.


Mit Hilfe der Zeilenwechsellasten  
können Sie Ihre Liste lesen..

Drücken Sie die Sterntaste, um das  
Verzeichnis zu verlassen.


## 12.3 Löschen eines Namens und einer Telefonnummer



+

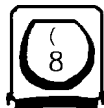

oder

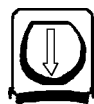

Drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste „8“.


Auf der ersten Zeile erscheint:  
Adressverz löschen:  
erster Buchstabe

Geben Sie den ersten Buchstaben des  
Namens ein, den Sie löschen wollen.  
Die Telefonnummernliste erscheint auf  
der Anzeige. Bezeichnen Sie mit dem  
schwarzen Balken den Namen, den Sie  
löschen wollen. Den Balken verschieben  
Sie mit der Zeilenwechsellaste.

Drücken Sie die Sterntaste.

Auf Zeile eins erscheint:  
Diesen Namen wirklich löschen? (Ja=J)  
Der Name und die Telefonnummer sind  
aus dem Verzeichnis gelöscht.  
Wenn Sie den Namen und die Telefonnummer nicht  
löschen wollen, drücken Sie an Stelle des "J" die  
Sterntaste.

## 12.4 Löschen der gesamten Telefonnummernliste

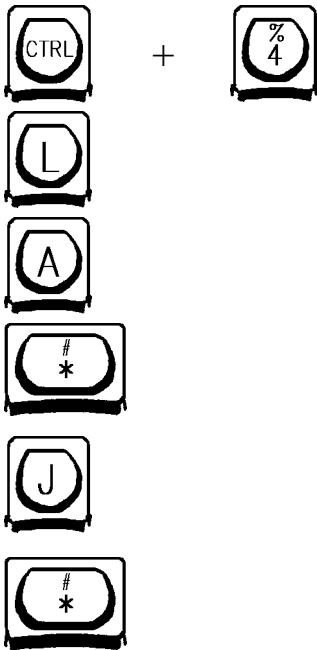

Drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste „4“.

Sie befinden sich nun im Menu.

Drücken Sie die Taste „L“.

Drücken Sie die Taste „A“.

Drücken Sie die Sterntaste.

Auf der Anzeige erscheint:  
löschen ? (J)

Drücken Sie die Taste „J“

Wollen Sie den Speicher nicht löschen, drücken Sie an Stelle der Taste „J“ die Sterntaste.

Drücken Sie die Sterntaste.

Die Telefonnummernliste ist gelöscht.

Menufunktionen  
S. 25

Löschen des Fest-  
speichers S. 17

Löschen des Anruf-  
speichers S. 20

## 13. Anrufspeicher

Wenn Sie den Anrufbeantworter eingeschaltet haben, werden die Anrufe in diesem Speicher aufgezeichnet. Jeder Anruf erhält eine Nummer.

Anrufbeantworter  
S. 10

### 13.1 Lesen der Anrufe

Drücken Sie die Beantwortertaste.

Auf der Anzeige erscheint:  
Beantworter ein=\*, Nummer=Anruf lesen  
Tippen Sie eine Zahl z. B. „1“.

Drücken Sie die Sterntaste.

Auf der Anzeige steht:

Beantworter lesen,  
Anruf No:01

Drücken Sie die Zeilenwechseltaste.


Mit der Zeilenwechseltaste können Sie den Anruf Zeile um Zeile lesen.

Wollen Sie nun den nächsten Anruf lesen,

drücken Sie die Beantwortertaste.

Drücken Sie z.B. die Taste „2“.

Drücken Sie die Sterntaste.

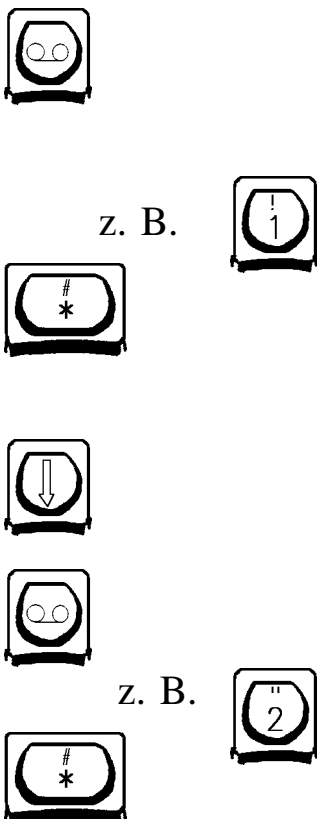



z. B.



Lesen Sie den Anruf mit Hilfe der Zeilenwechsellaste.

Wollen Sie den Anrufspeicher verlassen, drücken Sie die Sterntaste.

### 13.2 Löschen der Anrufe im Anrufspeicher

Drücken Sie die Beantwortertaste. Drücken Sie die Nummer des Anrufs, den Sie löschen wollen z.B. Taste „1“.

Drücken Sie die Sterntaste. Sie können den Anruf lesen.

Drücken Sie nun die Korrekturtaste. Auf der Anzeige steht: Beantworter löschen (J)? Anruf No:01

Drücken Sie die Taste „J“. Der Anruf No:01 ist gelöscht. Löschen Sie Anrufe, die Sie nicht mehr benötigen. Sie haben dann mehr Platz im Schreibspeicher.

Verschiedene Speicher im Telescrit S. 12

### 13.3 Löschen Ihres gesamten Anrufspeichers

Drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste „4“ Sie befinden sich nun im Menu.

Drücken Sie die Taste „L“. Drücken Sie die Taste „B“. Drücken Sie die Sterntaste. Auf der Anzeige erscheint: löschen? (J)


Drücken Sie die Taste „J“ Wollen Sie den Speicher nicht löschen, drücken Sie an Stelle der Taste „J“ die Sterntaste.

Drücken Sie die Sterntaste. Alle Ihre Gespräche im Anrufspeicher sind gelöscht.

Menufunktionen S. 25



+

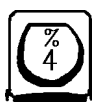

## 14. Schreibspeicher

Während des Telefonierens wird Ihr Gespräch im Schreibspeicher gespeichert. Jede gespeicherte Zeile wird nummeriert. Die Zeilen werden so aufgeteilt, dass keine Wörter getrennet werden.

Wenn Sie 50 Telefonnummern in Ihrem Verzeichnis gespeichert haben, haben Sie noch 700 Zeilen für ein Gespräch zur Verfügung.

Ist ein Gespräch länger als 700 Zeilen, werden die ersten Zeilen automatisch gelöscht und überschrieben. Wenn Sie das Telescrit ausschalten, wird der Schreibspeicher gelöscht.

### 14.1 Lesen des Schreibspeichers

Mit Hilfe der Zeilenwechseltasten können Sie den Text im Schreibspeicher lesen.



Drücken Sie die Zeilenwechseltaste (Pfeil nach oben).

Sie gelangen Zeile um Zeile rückwärts im Text, zurück bis Zeile 1 (Gesprächsanfang).



Drücken Sie die Zeilenwechseltaste (Pfeil nach unten).

Sie gelangen Zeile um Zeile vorwärts im Text, bis ans Ende des Gesprächs.



+




Drücken Sie die Umschalttaste und gleichzeitig die Zeilenwechseltaste (Pfeil nach oben).

Sie gelangen an den Anfang des Gesprächs, Linie 01.



+

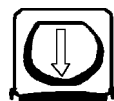

Drücken Sie die Umschalttaste und gleichzeitig die Zeilenwechseltaste (Pfeil nach unten).

Sie gelangen ans Ende des Gesprächs.

## 14.2 Lesen des Schreibspeichers während des Telefonierens



Während Sie telefonieren können Sie mit den Zeilenwechsellasten im Speicher lesen, ohne dass etwas gelöscht wird.

Lesen im Schreibspeicher S. 21



Drücken Sie die Umschalttaste und gleichzeitig die Zeilenwechsellaste (Pfeil nach unten).

Sie gelangen an die Stelle im Speicher, an der Ihr Gesprächspartner schreibt.

## 15. Vorbereitungsspeicher

Wenn Sie Telefongebühren sparen wollen, können Sie eine Meldung vorbereiten.



Schalten Sie das Telescrit ein. Schreiben Sie die Meldung.



**Wichtig:** Drücken Sie dann die Umschalttaste und gleichzeitig die Sterntaste, das ergibt: #.

Nun ist Ihr Text vorbereitet.

Sie rufen jemanden an S. 6

Wählen Sie die Telefonnummer.

Begrüßen Sie den Gesprächspartner, drücken Sie die START-Taste.

Automatische Wahl der Telefonnummer S. 7



Der vorbereitete Text wird übermittelt. Wollen Sie die automatische Übermittlung unterbrechen, drücken Sie die START-Taste.

Wenn Sie das Telescrit ausschalten, wird die vorbereitete Meldung gelöscht.

## 16. Speichern von Gesprächen

### 16.1 Speichern eines Telefongesprächs oder einer vorbereiteten Meldung im Schreibspeicher

Wollen Sie ein Telefongespräch oder eine vorbereitete Meldung speichern, drücken Sie immer vor dem Ausschalten des Telescrits die CTRL-

Verschieden Speicher im Telescrit S. 12



Taste und gleichzeitig die Taste „S“.  
Sobald Sie das Telescrit ausschalten ohne CTRL-Taste und gleichzeitig Taste „S“ gedrückt zu haben, wird der Schreibspeicher gelöscht. Meldungen, die im Schreibspeicher gespeichert sind, können Sie jederzeit einem Gesprächspartner übermitteln.


## 16.2 Speichern eines Telefongesprächs im Anrufspeicher

Wollen Sie ein Gespräch längere Zeit aufbewahren, können Sie es in den Anrufspeicher kopieren.

Drücken Sie CTRL-Taste und Taste "A".




Auf der Anzeige steht:  
Speichern? (Ja=\*)

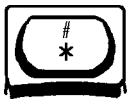

Drücken Sie die Sterntaste.

Das Gespräch ist im Anrufspeicher. Sie können es immer wieder lesen, aber keinem Gesprächspartner mehr übermitteln. Denken Sie daran: Je mehr Zeilen Sie im Anrufspeicher gespeichert haben, desto weniger Zeilen haben Sie bei einem Telefongespräch im Schreibspeicher zur Verfügung!

## 17. Das Menu

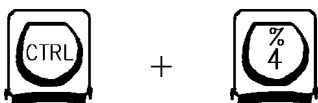

Mit Hilfe des Menus können Sie verschiedene Einstellungen am Telescrit vornehmen. Das Menu zeigt Ihnen schrittweise welche Tasten Sie drücken müssen, um Z. B. umzuschalten 4-zeilige / 8-zeilige Anzeige.

### 17.1 Menufunktionen

Sie gelangen ins Menu, indem die CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste „4“ drücken. Auf der Anzeige erscheint:  
T:eig.Tel / V:Verm. / A:Anz. / S:Ser. /  
L:Lösch / W:Wahl



Drücken Sie die Taste "A" .

Nun können Sie die Anzeige umschalten auf Gross- und Kleinbuchstaben oder auf 4 oder 8 Zeilen.

Drücken Sie die Taste "S" .

Auf der Anzeige erscheint die Seriennummer, die Version Ihres Gerätes, das eingestellte Wahlverfahren und die Vermittlungsnummer.

Drücken Sie die Taste "L" .

Sie können nun den Anrufspeicher , Festspeicher oder den Telefonnummernspeicher löschen.

Drücken Sie die Taste "W" .

Nun können Sie wählen zwischen I=Impulswahl, T=Tonwahl,

A=Automatisches Schalten auf Ton- oder Impulswahl.

Impuls- und Tonwahl sind die zwei Möglichkeiten, wie das Telescrit eine Telefonnummer wählt, um über die PTT-Telefonzentrale eine Verbindung herstellen zu können. Wenn Sie das Telescrit bekommen, ist die automatische Umschaltung eingestellt. Das Telescrit wählt je nach PTT-Zentrale im Ton- oder Impulsmodus.

**Lassen Sie das Wahlverfahren auf „automatisch“ eingestellt.**

Ausnahme: Wenn Ihr Telefon an einer Hauszentrale (z.B. im Geschäft) angeschlossen ist, kann es sein, dass die automatische Umschaltung nicht funktioniert. Stellen Sie dann auf Tonwahl.

Drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste „4“.

Drücken Sie die Taste „W“.

Drücken Sie die Taste „T“,

dann die Taste „J“

und dann die Sterntaste.



+





Drücken Sie die Taste "A" .

Nun können Sie die Anzeige umschalten auf Gross- und Kleinbuchstaben oder auf 4 oder 8 Zeilen.



Drücken Sie die Taste "S".

Auf der Anzeige erscheint die Seriennummer, die Version Ihres Gerätes, das eingestellte Wahlverfahren und die Vermittlungsnummer.



Drücken Sie die Taste "L".

Sie können nun den Anrufspeicher , Festspeicher oder den Telefonnummernspeicher löschen.



Drücken Sie die Taste "W".

Nun können Sie wählen zwischen I=Impulswahl, T=Tonwahl, A=Automatisches Schalten auf Ton- oder Impulswahl.

Impuls- und Tonwahl sind die zwei Möglichkeiten, wie das Telescrit eine Telefonnummer wählt, um über die PTT-Telefonzentrale eine Verbindung herstellen zu können. Wenn Sie das Telescrit bekommen, ist die automatische Umschaltung eingestellt. Das Telescrit wählt je nach PTT-Zentrale ilm Ton- oder Impulsmodus.

**Lassen Sie das Wahlverfahren auf „automatisch“ eingestellt.**

Ausnahme: Wenn Ihr Telefon an einer Hauszentrale (z.B. im Geschäft) angeschlossen ist, kann es sein, dass die automatische Umschaltung nicht funktioniert. Stellen Sie dann auf Tonwahl.

Drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste „4“.


Drücken Sie die Taste „W“.

Drücken Sie die Taste „T“, dann die Taste „J“

und dann die Sterntaste.




+

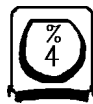



## 18.2 Sie werden mit V21 oder oder V22 V22 angerufen

Wenn Sie Anrufe von einem Computer mit Modem erwarten, müssen Sie das Telescrit auf automatische Anruferkennung umschalten.

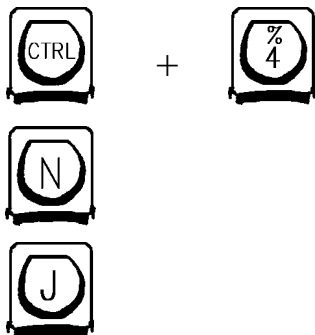

Drücken Sie CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste "4".


Menufunktionen  
S. 25

Drücken Sie die Taste "N" und dann die Taste "J".

Bei jedem Anruf prüft nun das Telescrit, ob ein Schreibtelefon (EDT-Norm) oder ein Computer (V21 oder V22) anruft. Es ist zu beachten, dass bei automatischer Erkennung von V21/V22, nach dem Belegen ein Antwortton von 8 Sek. Dauer gesendet wird. Während dieser Zeit ist die Tastatur blockiert.


Durch drücken von „CTRL+ 1“ wird von V21/V22 in den EDT-Modus umgeschaltet.

Infozeile S. 3

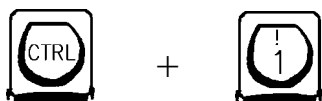

## 18.3 Doppelte Buchstaben: Echo ein/aus

Wenn beim Schreiben doppelte Buchstaben auf der Anzeige erscheinen, obwohl Sie die Taste nur einmal gedrückt haben, sendet der Computer ein "Echo". Drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig Taste 4 (Menu), dann die Taste "E" und dann die Taste "J".

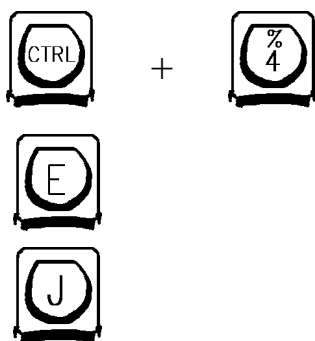

## 19. Option Computeranschluss

Haben Sie einen Computer (PC) und ein Telescrit 2002/2008, können Sie auf der Computer-Tastatur schreiben und auf dem Computer-Bildschirm lesen, was Sie mit dem Telescrit senden und empfangen. Die Telefonfunktionen (wählen, abnehmen, Beantworter) führen Sie auf der Telescrit-Tastatur aus.

**Voraussetzung:** Der Computer muss eine serielle Schnittstelle (RS-232) haben und wird mit dem Drucker-/Computerkabel ans Telescrit angeschlossen. Das Standard-Kabel hat eine Länge von 2m und eine D-Sub Kuppelung DB-9F. Als Steuersoftware auf dem PC empfehlen wir das Terminal-Programm von Windows 3.x mit TTY-Emulation. Für DOS Betriebssysteme bieten wir ein spezielles Terminalprogramm, GHE-TELES an.

Auf dem PC kann wenn nötig eine Schriftvergrößerung installiert werden (z.B. Zoomtext).

### 19.1 Installation Telescrit / PC

Das Telescrit hat eine serielle Schnittstelle (S) eingebaut. Das Computerkabel wird mit dem 10-Pol Flachstecker eingesteckt. Achtung: Die vorstehende Rippe am Stecker zeigt nach oben. Wenn der Stecker zu weit oben eingesteckt wird, verbindet er nicht alle Kontakte und es funktioniert nicht.

Die Schnittstelle am Telescrit muss auf Computermodus eingestellt werden:

Drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste "4".

Drücken Sie die Taste "P" (Port)



Drücken Sie die Taste "C" (Computer)

Drücken Sie die Sterntaste.

Auf dem PC wird ein Terminal-Programm benötigt. Folgende Programme können verwendet werden:

- MS-Windows 3.1 TERMINAL
- GHE-TELES1 für serielle Schnittstelle COM1: oder GHE-TELES2 für serielle Schnittstelle COM2:.
- Für Sehbehinderte kann dieses Programm mit der Schriftvergrößerung

Menufunktionen  
S. 25

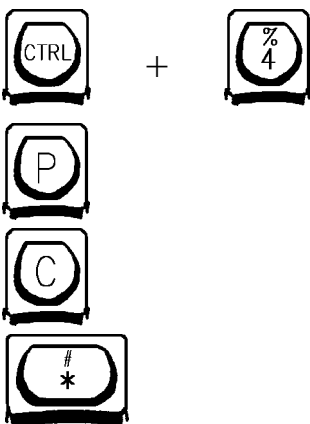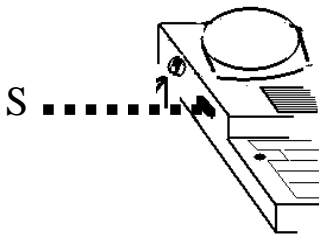

ZOOMTEXT kombiniert werden. Das Telescrit wird vor den PC-Bildschirm gestellt und mit der Telescrit-Tastatur bedient. Auf dem PC-Bildschirm wird das Gespräch mit vergrößerten Buchstaben angezeigt. Die PC-Tastatur wird nur für die Installation benötigt.

Folgende Einstellungen für Windows TERMINAL werden empfohlen:

- Telefonnummer: nicht benützt. Es muss auf dem Telescrit gewählt werden.
- Terminal Emulation: TTY.
- Terminal Einstellungen: Umwandlung: Deutschland, IBM in ANSI.
- Textübertragung: Zeichenweise, Verzögerung 1/10 Sek.
- Binärübertragung: nicht möglich
- Datenübertragung: 1200 Baud, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, keine Parität, kein Protokoll, Anschluss COM1: oder COM2:.
- Modembefehle: nicht möglich.
- Einstellung: Druckerecho ein oder aus, nach Bedarf (druckt erst beim Ausschalten).
- Telefon: nicht benützt, muss auf dem Telescrit bedient werden.
- Uebertragung: Textdatei nach Bedarf, Binärdatei nicht möglich.


Infozeile S. 3

## **20. Option Druckeranschluss zu Telescrit 2002/2108**


Die Gespräche vom Telescrit können auf dem Drucker ausgedruckt werden.

Voraussetzung: der Drucker muss eine serielle Schnittstelle (RS-232, 1200Bd) haben und wird mit dem Drucker-/Computerkabel ans Telescrit angeschlossen. Das Standard-Kabel hat eine Länge von 1.5m und eine D-Sub Kuppelung DB-9F. Von der ghe-ces electronic ag ist der Drucker EPSON P-40 mit passendem Kabel erhältlich.

## 20.1 Installation Telescrit/ Drucker

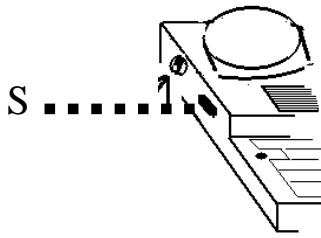

Das Telescrit hat eine serielle Schnittstelle (S) eingebaut. Das Drucker-kabel wird mit dem 10-Pol Flachstecker eingesteckt. Achtung: Die vorstehende Rippe am Stecker zeigt nach oben. Wenn der Stecker zu weit oben eingesteckt wird, verbindet er nicht alle Kontakte und es funktioniert nicht.

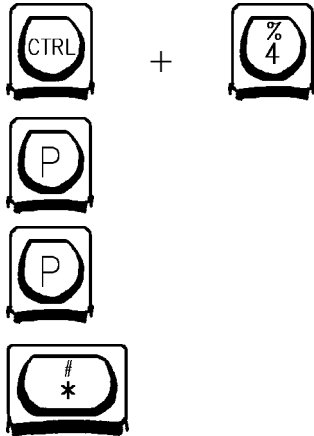

Die Schnittstelle am Telescrit muss auf Druckermodus eingestellt werden: Drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste "4".

Drücken Sie die Taste "P" (Port)

Drücken Sie die Taste "P" (Printer)

Drücken Sie die Sterntaste.

Beim Drucker wird die serielle Schnittstelle eingestellt auf:

- Baudrate: 1200Bd
- Datenbits: 8
- Parity: none
- Stoppbit: 1

## 20.2 Ausdrucken von Gesprächen

Bei eingeschaltetem Drucker, werden die Anrufe laufend ausgedruckt. Dies gilt auch im Anrufbeantworter-Modus.

### 20.3 Nachträgliches Ausdrucken:



+



a) Inhalt des Schreibspeichers (laufendes Telefongespräch) ausdrucken:

Verschiedene Speicher S. 12

Drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste "P" auf der Telescrit-Tastatur.



+



b) eine Beantwortermeldung ausdrucken:

Anrufbeantworter S. 10

gewünschte Meldung anzeigen

(Beantworter, Anruf lesen), dann drücken Sie die CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste "P"



+



c) alle Beantworter-Meldungen ausdrucken:

Beantwortertaste drücken, dann die CTRL-Taste und gleichzeitig die Taste "P" drücken.



## 21. Tastenkombinationen

4-zeilige Anzeige, 8-zeilige Anzeige: CTRL+4, A, 8 oder 4

Anfang/Ende des Gesprächs: Umschalttaste+Zeilenwechsellaste

Anrufbeantworter, Eingabe von Zeit, Datum: CTRL+5

Anzeigebeleuchtung: CTRL+Sterntaste=eingeschalten, CTRL+0=erlischt

Beantworteransage programmieren: Umschalttaste + SATZ, 0, Eingabe, SATZ

bewährte Regel: zwei Sterne,vier Sterne

Eingabe Telefonnummern: CTRL+7, Namen, Sterntaste, Telefonnummer, Sterntaste

Grossbuchstaben: CTRL+G

Gross- und Kleinbuchstaben: CTRL+K

Lesen der Beantworteransage: SATZ, 0

Lesen der einprogrammierten Sätze: SATZ z.B. 1

Lesen der Telefonnr.-liste: CTRL+6, Buchstabe, Zeilenwechsellasten, Sterntaste

Löschen Anrufe im Anrufspeicher: Beantwortertaste,Nr.,Sterntaste, Korrekturtaste, J

Löschen Anrufspeicher: CTRL+4, L, B, Sterntaste, J, Sterntaste

Löschen einprogrammierter Sätze: Umschalttaste+SATZ, Zahl, START

Löschen Festspeicher: CTRL+4, L, F, Sterntaste, J, Sterntaste

Löschen Namens/Telefonnr.: CTRL+8, Buchstaben, Zeilenwechsellaste, Sterntaste, J

Löschen der Telefonnummernliste: CTRL+4, L, A, Sterntaste, J, Sterntaste

Satz speichern: Umschalttaste+SA, 1-9 oder Buchstabe, Eingabe, SATZ-Taste.

Senden der einprogrammierten Sätze: SATZ, Zahl oder Buchstabe, START

Seriennummer, Version, Wahlverfahren,Vermittlungsnummer: CTRL+4, S

Speichern im Schreibspeicher: CTRL+S

Speichern im Anrufspeicher: CTRL+A, Sterntaste

Vorbereitungsspeicher Text schreiben, Umschalttaste+Sterntaste,anrufen, START

**Wahlverfahren: CTRL+4, W**

-Impulswahl: CTRL+4, W, I

-Tonwahl: CTRL+4, W, T

-Automatisches Schalten auf Ton- oder Impulswahl: CTRL+4, A

**Computer / Telescrit**

-V21: CTRL+3

-V22: CTRL+2

-auto. Anruferkennung V21/V22, EDT: CTRL+4, N, J

-Echo ein/aus: CTRL+4, E, J

-Schnittstelle Telescrit auf Computermodus einstellen: CTRL, 4, P, C, Sterntaste.

**Drucker / Telescrit**

-SchnittstelleTelescrit auf Druckermodus einstellen: CTRL+4, P, P, Sterntaste

-Nachträgliches Ausdrucken: CTRL+P

## 25. Stichwortverzeichnis

- Amtsholnummer 7
- Anfang des Gesprächs 21
- Anschluss ans Stromnetz 5
- Anschluss ans Telefonnetz 5
- Anzeige 9
- Anzeige 4-zeilig 9
- Anzeige 8-zeilig 9
- Anzeigebeleuchtung 10
- Anrufbeantworter 10, 19
- Anrufspeicher 13, 19
- Ausdrucken Gespräche 29
- Ausschalten 5
- automatische Anruferkennung 25
- automatische Wahl Telefonnummer 7
- automatisch Ton- / Impulswahl 23
- Batterie** 6
- Beantworteransage programmieren 14
- Computer 25,26
- Computeranschluss 25
- Direktanschluss** 5
- DOS Betriebssysteme 25
- Druckeranschluss Telescrit 27
- Drucker EPSON P-40 27
- Drucker serielle Schnittstelle 27
- Drucker / Telescrit Installation 28
- Echo ein/aus 25
- EDT 6
- Eingabe Telefonnummern 16
- Eingabe von Zeit, Datum 11
- Einschalten 5
- Ende des Gesprächs 21
- Festspeicher 13, 14
- Grossbuchstaben 10
- Gross- und Kleinbuchstaben 10
- Infozeile 6
- Impulswahl 24
- Kontrollzeichen** 6
- Lautstärkeregelung 26
- lesen der Anrufe (Beantworter) 18
- lesen der Beantworteransage 14
- lesen einprogrammierter Sätze 15
- lesen Telefonnummernliste 17
- löschen Anrufe im Anrufspeicher 19
- löschen Anrufspeicher 19
- löschen einprogrammierten Sätze 15
- löschen Festspeicher 16
- löschen Namens/Telefonnummer 17
- löschen Telefonnummernliste 18
- Modem** 25,26,27
- Menu** 22
- PC / Telescrit Installation** 26
- PC-Zoomtext 26
- rote LED 8
- Rufton für Hörende 11
- Satz einprogrammieren** 12
- Schreibspeicher 13, 20
- Schnittstelle Telescrit
  - auf PC-modus einstellen 26
  - auf Druckermodus einstellen 27
- senden der einprogrammierten Sätze 14
- serielle Schnittstelle (RS-232) 25,27
- Seriennummer 24
- speichern im Anrufspeicher 22
- speichern im Schreibspeicher 21
- Speicher im Telescrit 11
- Telefonnummernliste** 8, 16
- Telefonnummernspeicher 13, 16
- Terminalprogramm GHE-TELES 25,26
- Tonwahl 24
- Vorbereitungsspeicher 12,21
- V.21/V.22 28, 29
- Wahlwiederholung** 8
- Wahlverfahren 23
- Zeilenwechseltaste** 18,19,20
- zwei Sterne, vier Sterne 8
- 1200Bd 32