

ViTAB

Bedienungsanleitung

Kurzversion

Version 1.1
April 2011

Software-Version 1.0.3-rev4330



© 2011 ghe-ces electronic ag
ein Bereich der Genossenschaft Hörgeschädigten-Elektronik (Schweiz)



Inhalt

Inbetriebnahme des ViTABs (Quick-Setup)	4	Lautstärke anpassen	16
1. Packungsinhalt prüfen	4	Ändern der Sprache	16
2. Anschliessen und Aufstarten	5	Einstellen des Bildschirmschoners	17
3. Einrichten einer Verbindung via Ethernet	6	ViTAB als digitalen Bilderrahmen verwenden	17
4. Einrichten einer Verbindung via Wireless-Router	7	Anpassen des Hintergrundbildes	18
5. Sitzposition und Lichtbedingungen	8	Anzeigen der Software-Version	18
Hardware	9	Symbole während eines Anrufs	19
Hinweissymbole	10	Eigenbild anpassen während dem Gespräch	20
Hauptfunktionen	11	Video-Qualität anpassen während dem Gespräch	21
Videoanruf tätigen	12	Externe Anschlüsse	22
Kontakte verwalten	13	Tastatur oder Maus anschliessen (optional)	23
Anrufliste	14	Akku befestigen und verwenden (optional)	24
Internet	14	Sicherheit & Pflege	25
Einstellungen	15	Technische Angaben	26
		Support und Verkauf	27

Inbetriebnahme des ViTABs (Quick-Setup)

1. Packungsinhalt prüfen

Überprüfen Sie nach Erhalt Ihres ViTABs den Packungsinhalt auf Vollständigkeit:

- ViTAB
- schwarzes Netzgerät und Netzkabel
- Internet-Verbindungskabel (Ethernet)
- Stift für die Bedienung des Touchscreens
- Stoffhülle für den Transport

Dokumente:

- Blatt mit Ihren SIPCall-Kontoinformationen
- Bedienungsanleitung



*Die transparente Schutzfolie auf dem Touchscreen kann entfernt werden. Auf Reisen können Sie das ViTAB mit der Stoffhülle optimal schützen.


4

2. Anschliessen und Aufstarten

1. Das schwarze Netzteil mit dem Netzkabel verbinden und gut andrücken. Das Netzkabel an eine Steckdose anschliessen. Den kleinen, runden Stecker (1) an die Strombuchse des ViTABs anschliessen (Geräteunterseite).

2. Das ViTAB mit dem blauen Internet-Verbindungskabel (Ethernet) an Ihren Router, einen Switch oder eine Ethernet-Wandsteckdose anschliessen (2).

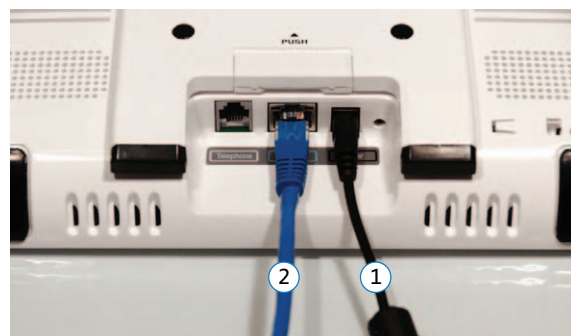

3. Das ViTAB am Hauptschalter einschalten (an der rechten Seite des Bildschirms) und warten, bis das ViTAB aufgestartet ist. Der Bildschirm zeigt für ca. 2 Minuten die Meldung „Booting the device...“.




* Falls Sie ihr ViTAB via einen Wireless-Router mit dem Internet verbinden wollen, lesen Sie die Anweisungen im Kapitel „Einrichten einer Wireless-Verbindung“.

5

3. Einrichten einer Verbindung via Ethernet

Wenn Sie das ViTAB mit dem Ethernet-Kabel an einen Router oder Switch angeschlossen haben, werden die Verbindungseinstellungen automatisch durchgeführt. Die Symbole  und  unten in der Statusleiste zeigen eine funktionierende Internetverbindung an.

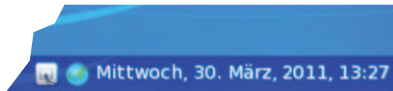

Das ViTAB erkennt die Internetverbindung automatisch und versucht sich beim SIPCall-Server anzumelden. Die Statusleiste zeigt die Meldung „Angemeldet als [Ihre Nr.](Ihr Name)“ nach erfolgreicher Verbindung zum SIPCall-Server.



6

Falls erforderlich, kann das ViTAB auch über PPOE mit dem Internet verbunden werden. Die Einstellungen dazu finden Sie unter:



[Einstellungen] [Netzwerk] [Ethernet] [Setup],

indem Sie einen Haken setzen beim Punkt **Netzwerk-Modus: PPOE** (in der Mitte oben). Die Zugangsdaten erhalten Sie von Ihrem Internet-Anbieter.

*Innerhalb eines Firmennetzwerks ist es möglich, dass trotz bestehender Kabelverbindung kein Kontakt zum SIPCall-Server aufgebaut werden kann. Wenden Sie sich in diesem Fall an den firmeninternen IT-Support.



4. Einrichten einer Verbindung via Wireless-Router

Das ViTAB hat einen eingebauten Wireless-Adapter, mit dem eine drahtlose Internetverbindung hergestellt werden kann.

Im Menü



[Einstellungen] [Netzwerk] [Wireless] [Setup]

werden automatisch die Wireless-Router in der nahen Umgebung angezeigt. Tippen Sie auf den Namen Ihres Wireless-Routers und geben Sie auf der rechten Seite das Wireless-Passwort ein (die passenden Sicherheitseinstellungen werden automatisch festgelegt). Tippen Sie auf , dann auf  [Zurück], damit die neuen Einstellungen übernommen werden.

Die Symbole  und  unten in der Statusleiste zeigen eine funktionierende Wireless-Internetverbindung an.

Nach erfolgreicher Anmeldung beim SIPCall-Server erscheint in der Statusleiste „Angemeldet als [Ihre Nr.]“.



* Swisscom-Kunden erhalten das Wireless-Passwort ihres Wireless-Routers von der Swisscom zugeschickt. Es kann im Online-Kundencenter auf der Swisscom-Website eingesehen und geändert werden.

7

5. Sitzposition und Lichtbedingungen

Für optimalen Komfort und gute Videodarstellung beim Gesprächspartner positionieren Sie sich ungefähr 100cm vom ViTAB entfernt.

Stellen Sie den Winkel der Kamera (oberhalb des Bildschirms) so ein, dass Sie sich im Eigenbild gut sehen können.

Ihr Gesicht sollte ausreichend (aber nicht grell) beleuchtet sein, damit ihr Gesprächspartner Sie gut sehen kann. Sprechen Sie sich gegebenenfalls mit Ihrem Gesprächspartner ab, um die Beleuchtung einzustellen.


Achten Sie darauf, dass Sie keine Fenster und keine andere helle Lichtquelle hinter sich haben. Sie sitzen sonst im Gegenlicht, was zur Folge hat, dass Ihr Gesicht sehr dunkel dargestellt wird.

Stellen Sie sicher, dass hinter Ihnen keine Objekte sichtbar sind, die der Gesprächspartner nicht sehen soll.

Tragen Sie keine gestreifte oder karierte Kleidung während einem Videoanruf, damit beim Gesprächspartner kein störendes Flimmern im Bild erscheint.

8



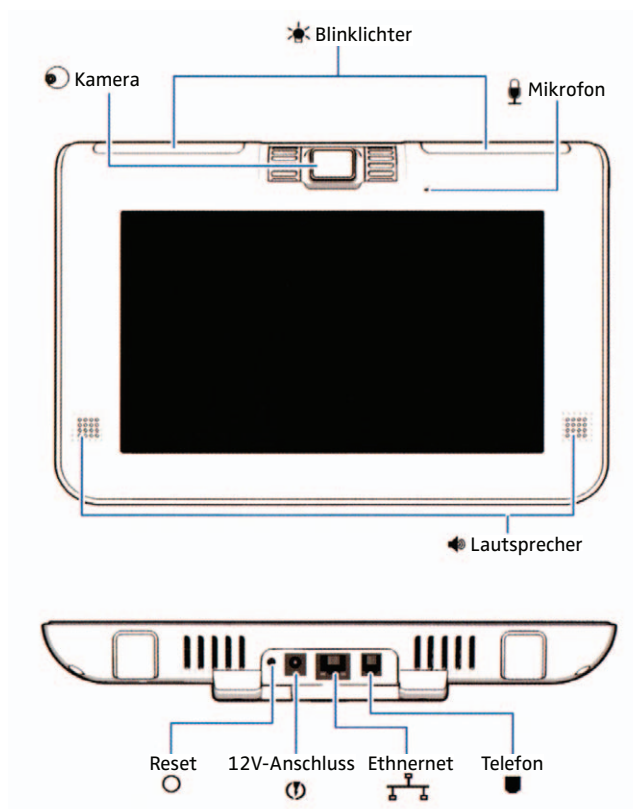









Hardware



9

Hinweissymbole








Die folgenden Symbole können während dem Betrieb des ViTABS unten am Bildschirm in der Statusleiste und in Hinweisfenstern angezeigt werden:

 Eingehender Anruf	 Ethernet-Kabel getrennt
 Ausgehender Anruf	 Ethernet-Kabel angeschlossen
 Verpasster Anruf	 Internet-Verbindung getrennt
 Informationen	 Internet-Verbindung hergestellt
 Warnmeldung	 Wireless getrennt
 Fehlermeldung	 Wireless verbunden


10

Hauptfunktionen

Nach dem Aufstarten des ViTABS erscheinen folgende Symbole auf dem Hauptbildschirm:
Tippen Sie auf...

 [Anrufen]	...um einen Anruf zu tätigen
 [Kontakte]	...um die Kontaktliste aufzurufen und zu bearbeiten
 [Nummer-Liste]	...um das ViTAB-Verzeichnis anzuzeigen (noch nicht verfügbar)
 [Anrufliste]	...um die vergangenen Anrufe anzuzeigen
 [Internet]	...um eine Website zu öffnen
 [RSS-News]	...um RSS-Feeds zu abonnieren
 [Einstellungen]	...um die Einstellungen des ViTABS anzupassen

Videoanruf tätigen


Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie auf dem Hauptbildschirm auf das Symbol  [Anrufen]. Geben Sie im erscheinenden Fenster die Videonummer der Person ein, die Sie anrufen möchten und tippen Sie anschliessend auf [Call]. Um den Anruf abzubrechen, drücken Sie auf [Cancel].



Wenn Sie einen Anruf auf Ihr ViTAB erhalten, erscheint auf dem Hauptbildschirm das Fenster „Ankommender Anruf“. Nehmen Sie den Anruf an, indem Sie auf [Accept] tippen. Um den hereinkommenden Anruf abzulehnen drücken Sie [Reject].




Wenn Sie einen Anruf verpasst haben, erscheint das Fenster „Anruf verpasst“. Sie können entweder die Nummer in Ihren Kontakten speichern [Save], die Nummer zurückrufen [Call], oder abbrechen [Cancel].

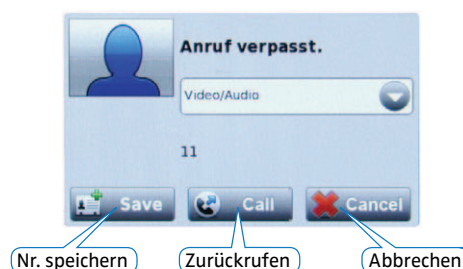

12

Kontakte verwalten



In der Kontaktliste können Sie Namen und Nummern der Ihnen bekannten Personen speichern und diese verschiedenen Gruppen zuordnen. Um die Kontaktliste zu öffnen, tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf  [Kontakte].


Es erscheint die Willkommenseite. Links oben ist Ihre Kontaktliste, links unten Ihre Kontaktgruppen. Drei Gruppen sind standardmässig vorhanden:


NOTFALL (Anrufe von Kontakten in dieser Gruppe werden automatisch angenommen),


SPAM (Anrufe von Kontakten dieser Gruppe werden automatisch abgelehnt)


PARTNER (Gruppe für Ihre Freunde und Bekannte).

Um einen Kontakt hinzuzufügen tippen Sie auf  [Neuer Kontakt]. Geben Sie im erscheinenden Fenster Name, Nummer und Gruppenzugehörigkeit an. Bestätigen Sie die Eingaben mit .

Um einen gespeicherten Kontakt anzurufen, tippen Sie auf den Namen in der Kontaktliste links oben und dann auf  [Anruf].

Um einen Kontakt zu löschen, tippen Sie auf den Namen in der Kontaktliste links oben und dann auf  [Kontakt löschen].

Sie können weitere Gruppen erstellen, indem Sie auf  [Neue Gruppe] tippen.


Mit  [Gruppe löschen] können Sie eine Gruppe aus der Liste löschen (Kontakte, die dieser Gruppe zugeordnet sind, werden dabei nicht gelöscht).

Anrufliste

In der Anrufliste werden die gewählten, empfangenen und verpassten Anrufe mit Nummer, Datum und Zeit gespeichert (je ca. 10 Einträge).



Um die Anrufliste anzuzeigen tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf  [Anrufliste].

Wählen Sie...

 um die empfangenen Anrufe anzuzeigen


 um die gewählten Nummern anzuzeigen


 für die verpassten Anrufe.

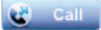Um einen Eintrag aus der Anrufliste anzurufen, tippen Sie auf die gewünschte Nummer oder den Namen. Es erscheint das Fenster „Ausgehendes Gespräch“. Tippen Sie auf  um den Anruf zu starten, oder auf  um den Anruf abzubrechen.


14

Internet

Mit dem integrierten Internet-Browser können Sie Websites aufrufen. Um den Browser zu öffnen, tippen Sie auf dem Hauptbildschirm auf  [Internet]









Geben Sie im Adressfeld die URL einer Website ein und tippen Sie auf .

Der Internet-Browser lässt sich im Weiteren bedienen wie der Browser auf Ihrem Computer.

Mit Tippen auf  gelangen Sie zurück zum Hauptbildschirm.

Einstellungen

Wenn Sie auf dem Hauptbildschirm auf  [Einstellungen] tippen, erscheinen folgende Einstellungssymbole:



	[Anrufe]	Allgemeine Einstellungen für den Videotelefonbetrieb
	[Audio]	Lautstärkeanpassung und Mikrofoneinstellungen
	[Kamera]	Optimieren des Videobildes
	[Codec]	Übertragungsstandard (bitte Einstellungen nicht verändern!)
	[Netzwerk]	Konfiguration der Internet-Verbindung
	[Anzeige]	Sprach- und Display-Einstellungen
	[System]	Anzeigen von Systeminformationen und Zeiteinstellungen
	[B/G]	Hintergrundbild des Hauptbildschirms ändern


Lautstärke anpassen

Um die Lautstärke des ViTAB-Ruftons anzupassen wählen Sie  [Einstellungen], dann  [Audio].

Benutzen Sie die Pfeile links und rechts um die **Einstellung Lautstärke Rufton** anzupassen. Wenn die Lautstärke vollständig runtergestellt wurde (Pfeil links), ertönt kein Rufton mehr.

Ändern der Sprache

Wählen Sie  [Einstellungen], dann  [Anzeige], um die Systemsprache zu ändern. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache mit dem Auswahlfeld beim Punkt **Sprache**. Zur Auswahl stehen zurzeit Deutsch, Französisch, Englisch und Flämisch.

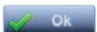Nach dem Bestätigen der neuen Sprachwahl mit  startet das ViTAB automatisch neu.

Einstellen des Bildschirmschoners

Sie können festlegen, wie sich das Display des ViTABs verhält, wenn das ViTAB eingeschaltet ist, aber längere Zeit nicht verwendet wird.

Legen Sie unter  [Einstellungen],  [Anzeige] beim Menüpunkt **Timeout Bildschirmschoner** die Anzahl Minuten fest, die das Gerät warten soll, bevor es den Bildschirmschoner einschaltet.

Wählen Sie nun im Wahlfeld **Bildschirmschoner** Ihre gewünschte Variante aus:

Kein: Es wird kein Bildschirmschoner eingeschaltet.

Leer: Das Display wird schwarz.




Diashow: Ihre Fotos werden angezeigt.

Normal: Verpasste Anrufe werden angezeigt.

Sparmodus LCD: Das Display wird ausgeschaltet, oben rechts am Gerät beginnt eine LED grün zu leuchten, bis das ViTAB durch Antippen wieder aktiviert wird. Anrufe können trotzdem empfangen werden.

ViTAB als digitalen Bilderrahmen verwenden





Der Bildschirmschoner des ViTABs kann als digitaler Bilderrahmen verwendet werden. Dazu müssen Ihre Fotos auf einer SD-Karte gespeichert werden (nicht mitgeliefert).

1. Erstellen Sie auf der SD-Karte auf oberster Ebene einen Ordner namens „svp5000“
2. Erstellen Sie darin einen Unterordner namens „slideshow“.
3. Kopieren Sie Ihre Fotos in den Ordner „slideshow“. Die Bilddateien müssen im GIF-, JPG- oder PNG-Format vorliegen. Die einzelnen Fotos dürfen nicht mehr als 4 Megabyte gross sein.
4. Schieben Sie nun die SD-Karte in den SD-Kartensteckplatz des ViTABs (einrasten).
5. Wählen Sie nun  [Einstellungen],  [Anzeige], dann im Wahlfeld **Bildschirmschoner** die Option **Diashow**. Mit  [Zurück] gelangen Sie wieder zum Hauptbildschirm.

Anpassen des Hintergrundbildes

Der blaue Standard-Hintergrund des Hauptbildschirms kann mit einem eigenen Foto ersetzt werden.



Das neue Hintergrundbild muss im Format JPG, GIF oder PNG auf einer SD-Karte (nicht mitgeliefert) gespeichert werden. Die Bilddatei muss auf der obersten Ebene der SD-Karte in einem Ordner namens „svp5000“ abgelegt sein. Die optimale Bildgröße beträgt 800x480 Pixel. Die SD-Karte kann nun im SD-Kartensteckplatz des ViTABs eingerastet werden.

Im Menü  [Einstellungen],  [B/G] werden alle Bilddateien im Ordner „svp5000“ aufgelistet. Wenn Sie einen Bildnamen antippen, wird eine Vorschau geladen. Wählen Sie  [Apply] und dann  [OK], um das gewählte Bild als Hintergrund zu verwenden.

Tippen Sie auf  [Default] um den Standard-Hintergrund wieder herzustellen.

18

Anzeigen der Software-Version

Wenn Sie von einem Support-Techniker gefragt werden, mit welcher Software-Version Ihr ViTAB läuft, können Sie dies unter  [Einstellungen],  [System] in der ersten Zeile beim Punkt **Version System/Application** ablesen und notieren.

Symbole während eines Anrufs

Wenn Sie in einem Videogespräch verbunden sind, stehen folgende Bedienelemente zur Verfügung:




Eigenbild anpassen während dem Gespräch

Die Grösse und Position des Eigenbildes kann während dem Gespräch angepasst werden.

Wenn Sie während einem Videogespräch auf das Symbol  [Darstellung] tippen, wird die Anordnung der Videobilder in der folgenden Reihenfolge verändert:

- Kleines Eigenbild in einer Ecke des Fremdbildes
- Eigenbild und Fremdbild diagonal gegenüber
- Eigenbild und Fremdbild nebeneinander
- Eigenbild und Fremdbild übereinander


Sie können das Eigenbild auch ganz ausblenden, indem Sie während dem Gespräch auf das Symbol  [Eigenbild] tippen. Erneutes Tippen auf dieses Symbol blendet das Eigenbild wieder ein.

Um das Eigenbild in eine andere Ecke des Fremdbildes zu verschieben, tippen Sie in den gewünschten Eckbereich und das Eigenbild wird dorthin verschoben.


Jedes Mal wenn Sie auf das Eigenbild tippen, wird es entweder vergrössert oder verkleinert (funktioniert nur, wenn das Eigenbild in einer Ecke des Fremdbildes dargestellt wird).

Video-Qualität anpassen während dem Gespräch

Wenn Ihr Gesprächspartner Ihnen mitteilt, dass Sie bei ihm/ihr nicht in guter Qualität dargestellt werden, dann ist wahrscheinlich die Datenmenge des Videobildes zu hoch für Ihre eigene, ausgehende Internet-Verbindung.


Um Ihr eigenes Video mit kleineren Datenmengen zu senden, tippen Sie während einem Gespräch auf das Symbol  [Einstellung]. Im erscheinenden Einstellungsfenster tippen Sie auf den Button [Control].

Beim Punkt **Netzwerk-Bandbreite** wählen Sie mit dem linken Pfeil die nächsttiefere Datenmenge, z.B. **256Kbps**. Die Standardeinstellung ist **384Kbps**. Nach dem Beenden des Gesprächs gilt wieder die Standardeinstellung.

Tippen Sie erneut  [Einstellung] um das Einstellungsfenster zu schliessen.

Externe Anschlüsse

Am ViTAB sind folgende Anschlüsse für externe Geräte vorhanden:

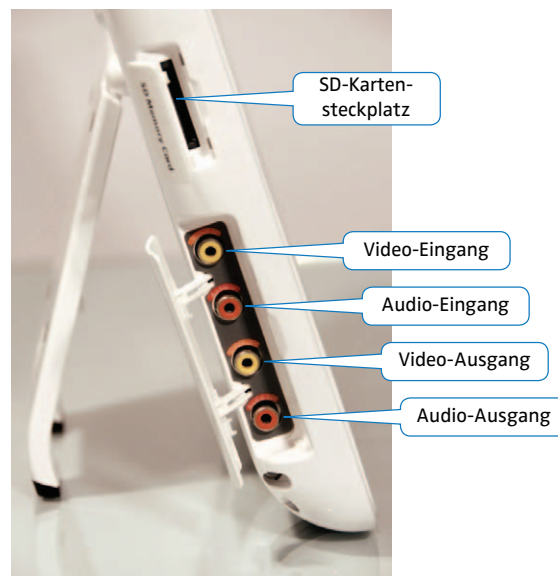

22

Die Anschlüsse am ViTAB können folgendermassen verwendet werden:

- **Externer Audio-/Videoausgang** (Cinch) für externe Monitore
- **Externer Audio-/Videoeingang** (Cinch) für compatible Kameras, DVD-Player und Spielkonsolen
- **SD-Kartensteckplatz** für SD-Memory-Card mit Ihren persönlichen Fotos/Hintergrundbildern
- **Anschluss für externes Mikrofon** (3.5mm)
- **Anschluss für externe Kopfhörer/Lautsprecher** mit einem 3.5mm-Klinke-Stecker
- **zwei USB-Anschlüsse** um eine Maus und eine Tastatur oder einen USB-Stick anzuschliessen
- **Telefonbuchse** für das Anschliessen eines externen Telefons oder einer Lichtsignalanlage (Unterseite des ViTABs)
- **Integrierter Bluetooth-Adapter** für die Verwendung von drahtlosen Bluetooth-Headsets

Tastatur oder Maus anschliessen (optional)

Das ViTAB kann mit einer Computer-Maus und -Tastatur verbunden werden, wenn diese über einen USB-Stecker verfügen.

Stecken Sie die Maus und/oder Tastatur nach dem Aufstarten in je einen der USB-Steckplätze des ViTABs ein.

Bevor Sie das ViTAB neustarten, müssen die Tastatur oder Maus entfernt werden, um eine Fehlfunktion nach dem Neustart auszuschliessen.

* Für eine optimale Flexibilität beim Bedienen des ViTABs kann auch ein Wireless-Keyboard oder eine Wireless-Maus mit USB-Dongle verwendet werden.

23

Akku befestigen und verwenden (optional)

Für den mobilen Einsatz des ViTABs können Sie einen optional erhältlichen Akku an das Gerät anschliessen (Modellnummer: SVP-5000BT).

Die Laufzeit des ViTABs im Akkubetrieb variiert je nach Verhältnis von Gesprächs- und Standby-Zeit und beträgt im Standby-Modus (ohne Bildschirmschoner) ca. 2 Stunden.

Der Akku lässt sich auf der Rückseite des ViTABs mit vier Schrauben am Standbein befestigen (nur die Schrauben im Lieferumfang des Akkus verwenden, der Akku kann sonst beschädigt werden!).


Vor dem Festschrauben des Akkus müssen Sie mit einem Kugelschreiber die vier schwarzen Gummipoppen aus den Schraubblöchern im Standbein herausdrücken. Geben Sie beim Festschrauben des Akkus darauf acht, dass Sie das Standbein des ViTABs nicht weiter als bis zum Anschlag aufklappen.

24

Verbinden Sie das kurze Kabel des Akkus mit dem ViTAB **①** und das Kabel vom Netzteil mit dem Akku **②**.

Wenn die Ladelampe des Akkus rot leuchtet, wird der Akku geladen. Die Ladelampe leuchtet gelb, wenn der Akku voll ist. Eine volle Ladung braucht ca. 4 Stunden.

Um den Ladestand des Akkus zu überprüfen, ziehen Sie das Kabel des Netzteils **②** aus dem Akku und halten Sie am Akku den Knopf **③** [Press Power Check] gedrückt.

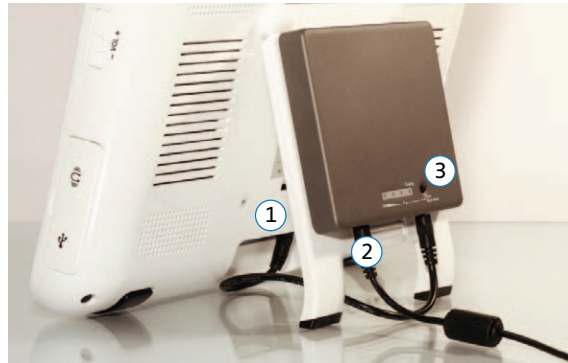

Sicherheit & Pflege

Das ViTAB ist ein elektronisches Gerät und muss deshalb mit der gebührenden Vorsicht behandelt werden:

- Das Gehäuse darf nur von Ihrem Service-Techniker geöffnet werden. Sie verlieren bei einem Öffnungsversuch jegliche Garantieansprüche.
- Setzen Sie das ViTAB nie erhöhter Luftfeuchtigkeit (z.B. im Bad) oder einer Flüssigkeit aus. Wasser kann die Elektronik im ViTAB beschädigen. Sollte Wasser ins ViTAB gelangen, schalten Sie es sofort aus und lassen Sie es über Nacht trocknen.
- Das ViTAB sollte keinen extrem kalten oder heißen Temperaturen ausgesetzt werden. Der Bildschirm kann bei Temperaturen um den Gefrierpunkt unlesbar werden, was sich bei Raumtemperatur wieder normalisiert.
- Lassen Sie das ViTAB niemals fallen.
- Ziehen Sie eingesteckte Kabel nie mit Gewalt aus den Steckbuchsen des ViTABs.
- Drücken Sie nicht mit zuviel Kraft oder mit spitzen Gegenständen auf den Touchscreen, da dieser sonst beschädigt wird.
- Halten Sie das ViTAB fern von Magneten, z.B. magnetischen Kartenhaltern, Bleistiftspitzern oder grossen Lautsprechern.
- Reinigen Sie das ViTAB mit einem weichen, leicht feuchten Tuch und ganz wenig Seife (niemals lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel oder Reinigungsbenzin verwenden!).

* Verwenden Sie einen Bildschirmschoner (z.B. Diashow mit mehreren Bildern oder den LCD-Stromsparmodus) um das Einbrennen von Bildschirmhalten im LCD-Display zu verhindern.

Technische Angaben

Allgemein

LCD-Touchscreen (800x480)
Verstellbare, integrierte Kamera
IP-Videokommunikation @ 30fps
Web-Browser & Web-Server
(Fernwartung möglich)
Autoprovisioning
Wi-Fi (802.11b/n/g), Bluetooth
Benutzer-Input über Touchscreen
oder USB-Keybaord (optional)
Digitaler Bilderrahmen über SD/
USB Memory
Anschlussmöglichkeiten für
externe Audio-/Videogeräte

Telefonfunktionen

Anrufsignal über LED-Leuchten
(Farbdifferenzierung nach Grup-
pen) sowie Lichtruf (Alert)
Automatische Anrufannahme/-
verweigerung
Automatische Media Capability
Negotiation
Anrufe aus Verlauf/Telefonbuch
Chat-Funktion
Verlaufsliste
Telefonbuch
Kurzwahlliste

Anruferidentifizierung
Anruf wiederholen
Anruf halten
Anrufweiterleitung (Aktiv/Passiv)
3-Weg-Videokonferenz ohne MCU
Ton/Bild muten
Registrierung an SIP Server mit
Authentifizierung (MD5) und
Registrierungs-Timeout

Videoauflösung

VGA (640x480)
QVGA (320x240)
CIF (352x288)
QCIF (176x144)

Video-Codexs

H.263 SP
H.264 SP

Audio-Codexs

G.711 a-law / μ law
G.722
G.723.1A
G729AB

Foto-Decoder

GIF, JPEG, PNG

Spezielle Audio-Features

Acoustic Echo Cancellation AEC
Adaptive Jitter Bugger AJB
Comfort Noise Generation CNG
Packet Loss Concealment PLC
Voice Activity Detection VAD

Prozessor

TI Davinci (ARM: 300MHz,
DSP: 600MHz)
128MB NAND Flash
256MB DDR2 SDRAM

Telefon-/Netzwerk-Protokolle

SIP (RFC 2976, 3261-64)
SDP (RFC 2327)
RTP / RTCP (RFC 3550, 3551)
RTP Payload (RFC 2190, 2833,
3047, 3984)
DHCP (RFC 2131)
SNTP (RFC 2030)
NAT Firewall Traversal (RFC 3581,
4961)
HTTP (RFC 2616)

Interfaces

10/100Mbps Ethernet (RJ-45)
USB 2.0 (2 Anschlüsse)

SD-Kartensteckplatz
Hochwertige CCD-Kamera
Eingebautes Mikrofon (Mono)
Eingebauter Lautsprecher (Stereo)
Headset und Mikrofon (3.5mm-Jack)
Externer Audio-Ein-/Ausgang (RCA)
Externer Video-Ein-/Ausgang (RCA)
Anschluss für externes Telefon (RJ-11)
Akku 2000mAh (optional)
VESA-kompatible Schraubgewinde

Abmessungen

294mm x 213mm x 38mm

Gewicht

1,35kg (ohne Akku)

Leistungsaufnahme

26 Watt
12 Watt (Standby)

Netzteil

12V DC 3.0A
Bei Feuchtigkeit 0 bis 80%
Bei Temperatur 0-50° C

26

Support und Verkauf Schweiz

ghe-ces electronic ag
Hömelstrasse 17
8636 Wald ZH



Telefon/Telescrit 055 246 28 88
Videotelefon 055 511 28 30
Fax 055 246 49 49

E-Mail

info@ghe.ch (Beratung und Bestellung)
support@ghe.ch (technischer Support)

Internet

www.ghe.ch

Support und Verkauf Deutschland

Mobily ProCom GmbH
Schwanthaler-Str. 76
80336 München



Bildtelefon 089/957 602 67
Telefon 089/957 897 42
SMS 0173/358 91 53
Fax 089/957 52 41

E-Mail

info@mobilypro.com

Internet

www.mobilypro.com